



1

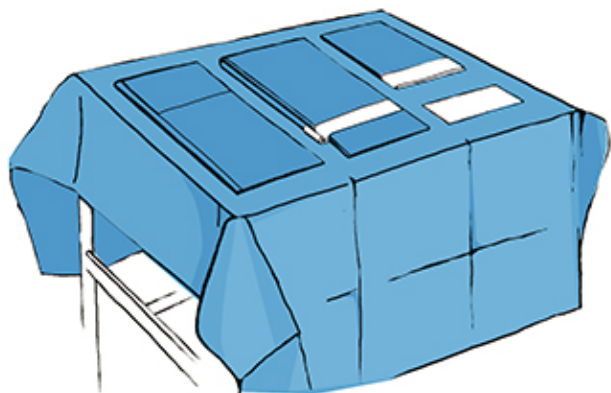

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта. Обратите внимание на символы, всказывающие в каком направлении следует раскладывать простыни.

2

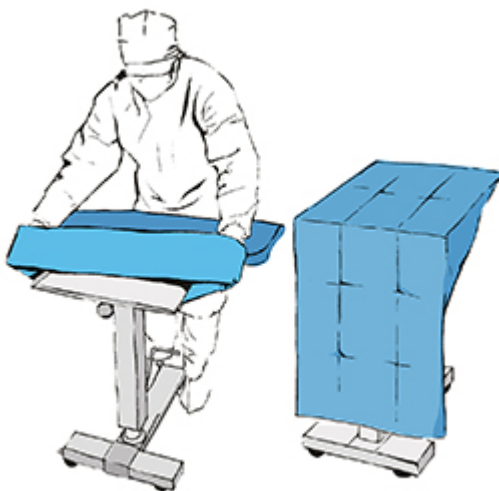

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Mayo.


3



Отклеиваем бумажный слой от хирургической пленки основной простыни и наклеиваем пленку на живот, обозначив границы операционного поля.


# Инструкция разложения комплекта для кесарева сечения Matodrape

4

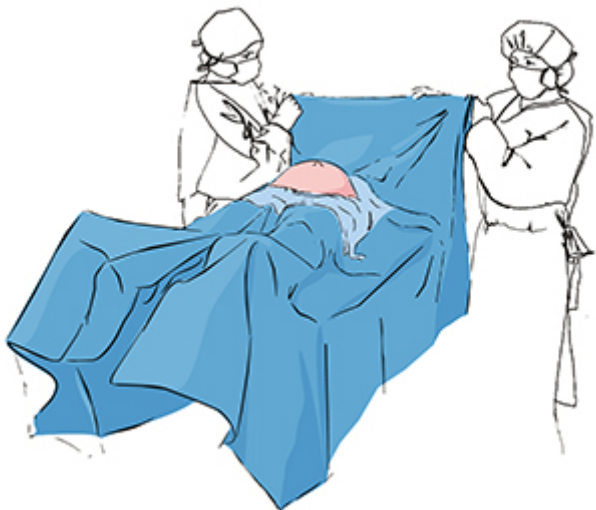

Нижнюю часть простыни раскладываем на ноги пациентки. Со стороны голов, крепим простыню к анестезиологическому экрану при помощи адгезивных краев.

5

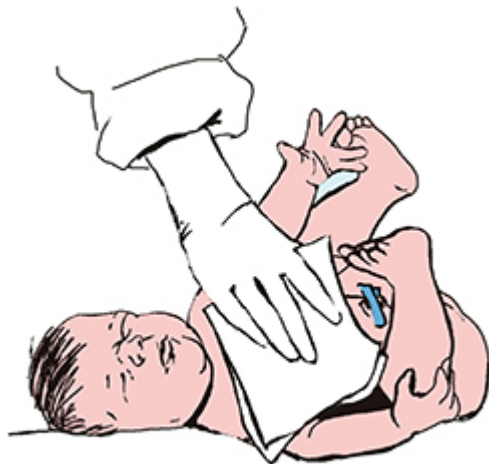

Следует осушить новорожденного полотенцами из нетканого материала.

6



В меньшую гигиеническую пеленку Seni Soft заворачиваем ребенка, одевая на голову шапочку.