


1

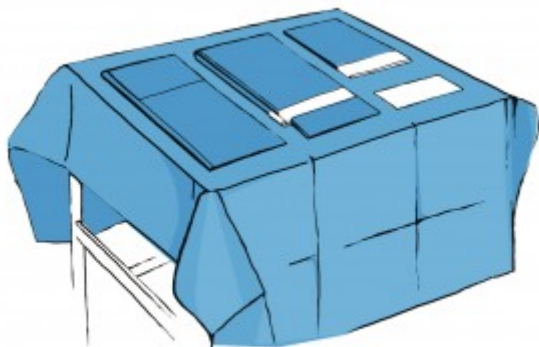

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Внешней простыней закрываем стол и раскладываем остальные элементы комплекта.

2



Следует положить гигиеническую пеленку Seni Soft под ягодицы пациентки.


3



Салфеткой, которая находится внутри комплекта следует окатать ногу пациентки, чтобы обеспечить стерильность операционного поля.

Инструкция разложения комплекта для родов Matodrape

4

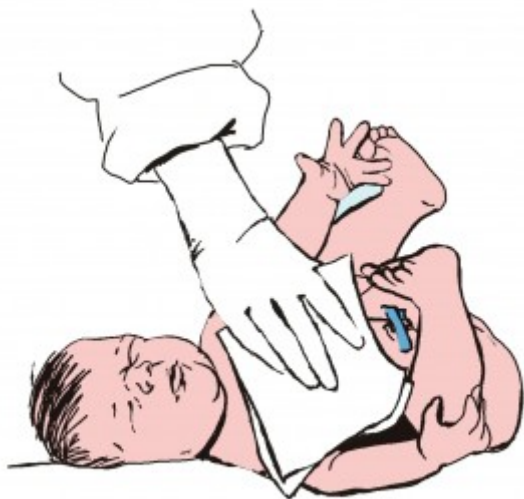

Следует осушить новорожденного полотенцами из нетканого материала.

5



В меньшую гигиеническую пеленку Seni Soft заворачиваем ребенка, одевая на голову шапочку.