


1

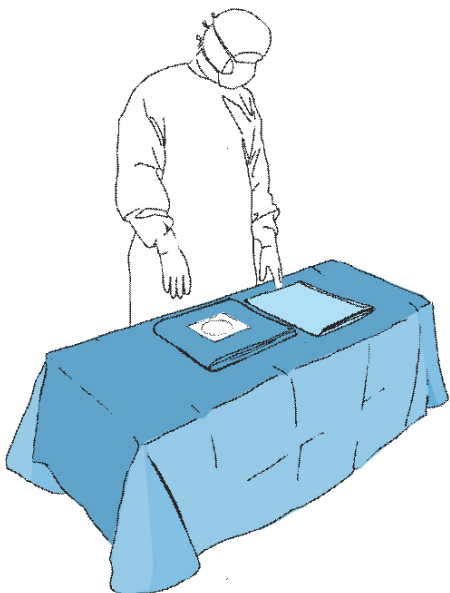


Вскрываем внешнюю упаковку соблюдая принципы асептики и размещаем комплект на столе для инструментов. Раскладываем внешнюю простыню на столе для инструментов, а на ней – отдельные элементы комплекта.

2



Прежде чем разложить простыню на пациенте (то есть обозначить операционное поле), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.


3

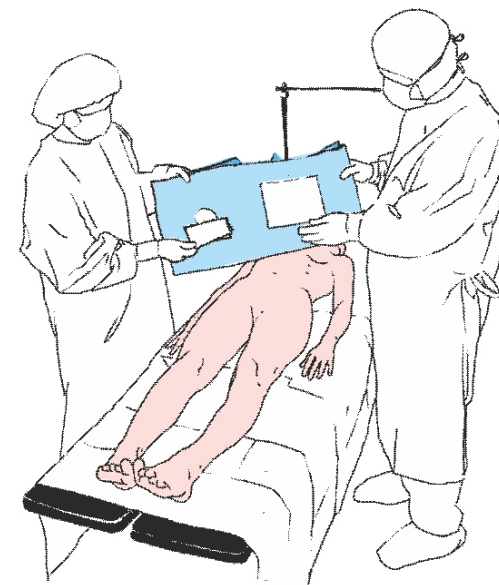

Удаляем защитную бумагу с одного из отверстия основной простыни (другое отверстие остается закрытым).


# Инструкция разложения комплекта для ангиографии Matodrape

4

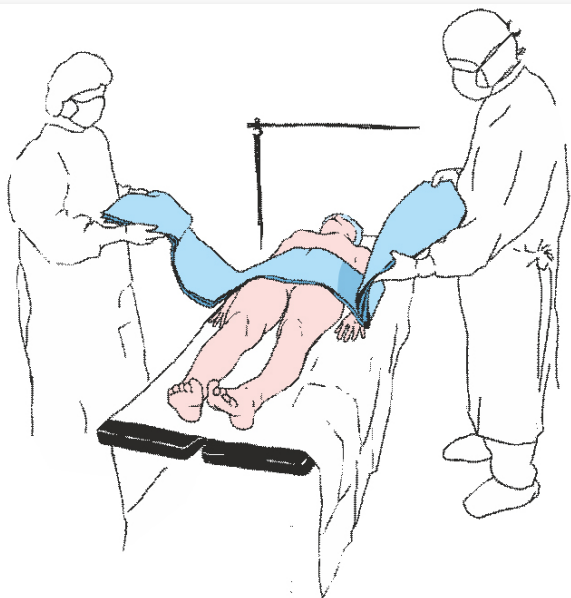

Приклеиваем ее, обозначая таким образом операционное поле. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.

5

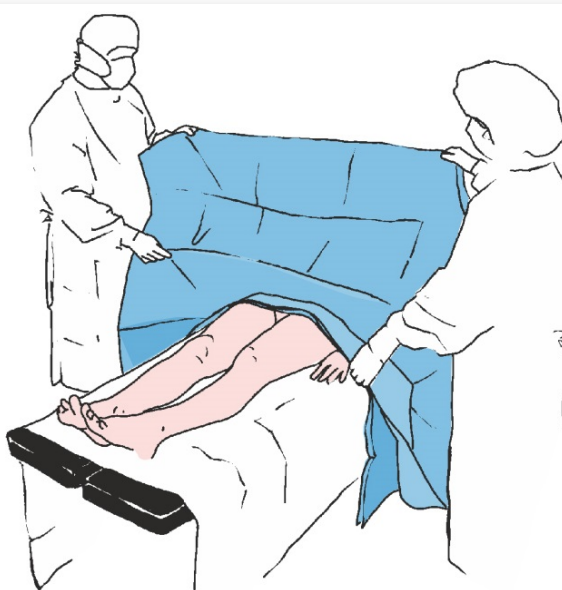

Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола а верхнюю часть простыни разворачиваем в направлении головы пациента


6



Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента.


# Инструкция разложения комплекта для ангиографии Matodrape

7

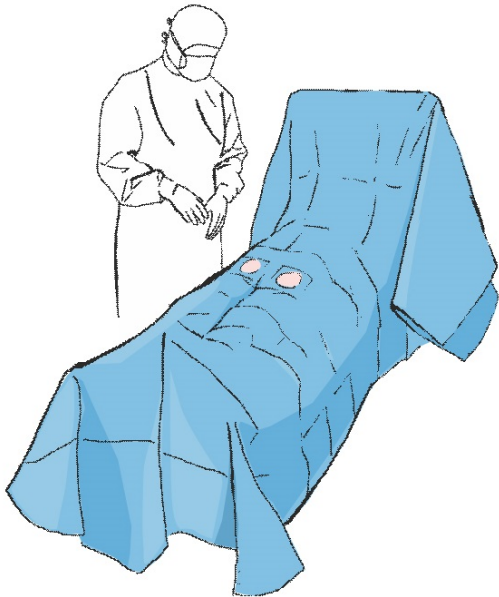

На анестезиологический экран следует надеть отдельное меньшее защитное покрытие, которое отделяет голову пациента от операционного поля.

8

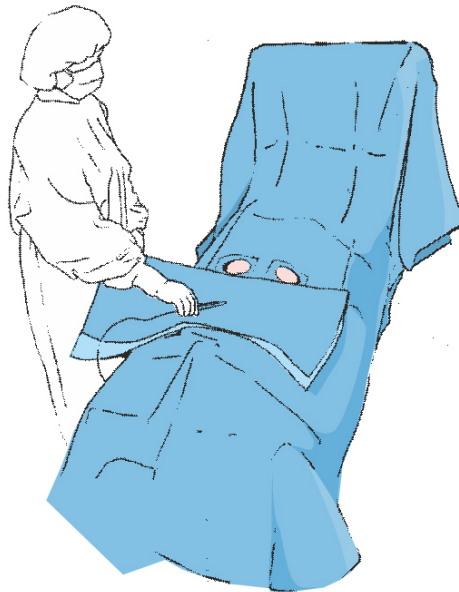

Далее, размещаем на пациенте дополнительную простыню.