


1



Вскрываем внешнюю упаковку соблюдая принципы асептики и размещаем комплект на столе для инструментов. Раскладываем внешнюю простыню на столе для инструментов, а на ней – отдельные элементы комплекта.

2

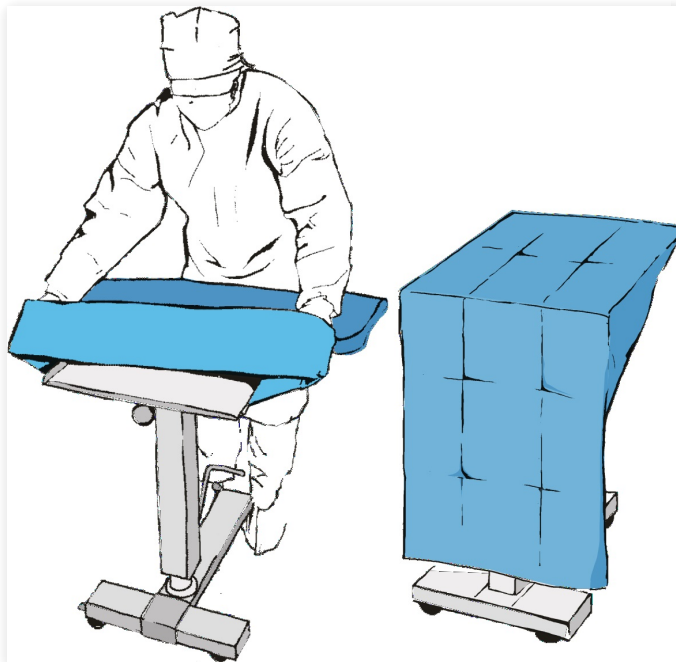

Натягиваем чехол на столик Мейо.


3



Прежде чем разложить простыню на пациенте (то есть обозначить операционное поле), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.


# Инструкция разложения комплекта для байпаса Matodrape

4

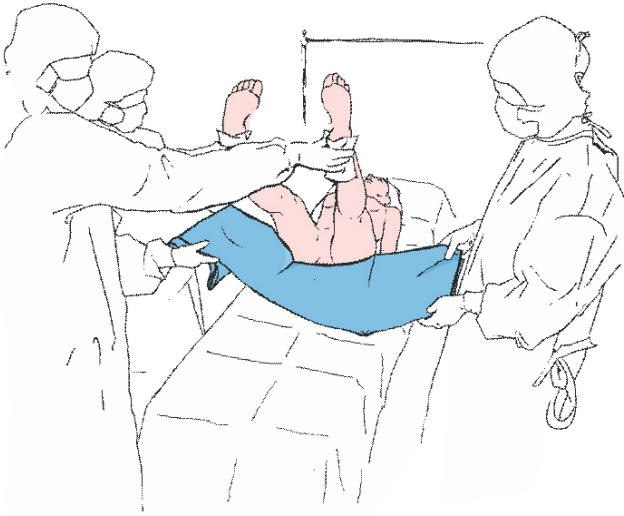


Подносим вверх ноги пациента, используя для этого салфетки, находящиеся в комплекте. Под поднятые ноги следует подложить простыню с прикрывающим клапаном на промежности.

5

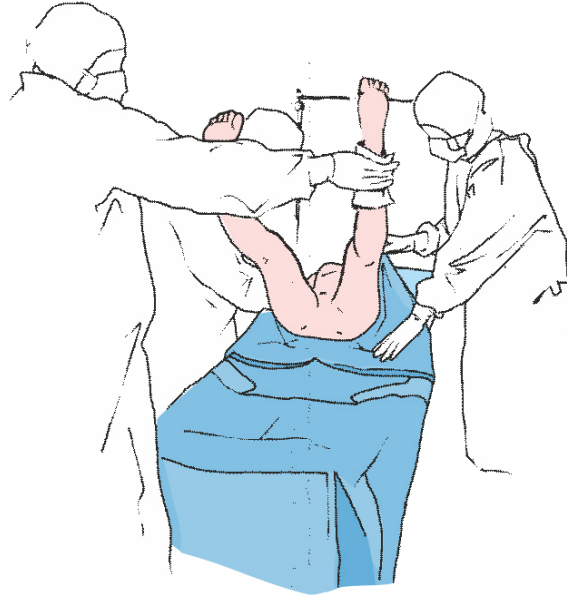

Развернуть простыню в направлении нижнего конца рабочего стола.


6

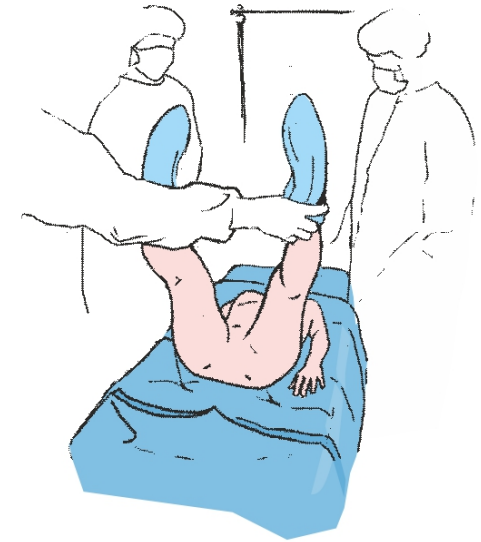

Одеваем чехлы на ноги пациента и тщательно крепим их в области голеностопных суставов.

# Инструкция разложения комплекта для байпаса Matodrape

7

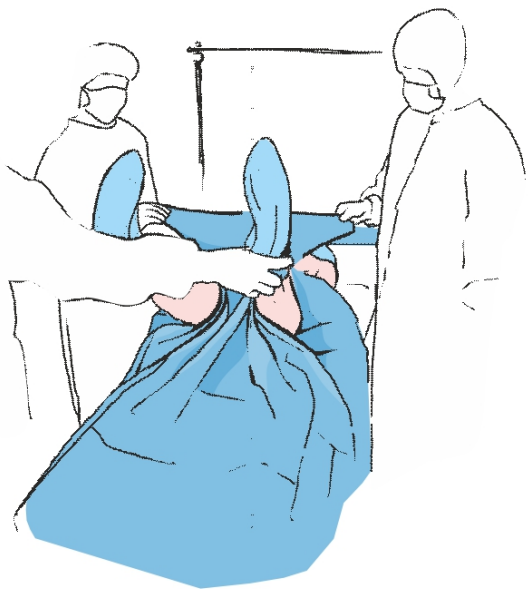


Перекидываем прикрывающий клапан между бедрами пациента, ...

8



... удаляем защитную бумагу и приклеиваем клапан к нижней части живота.


9

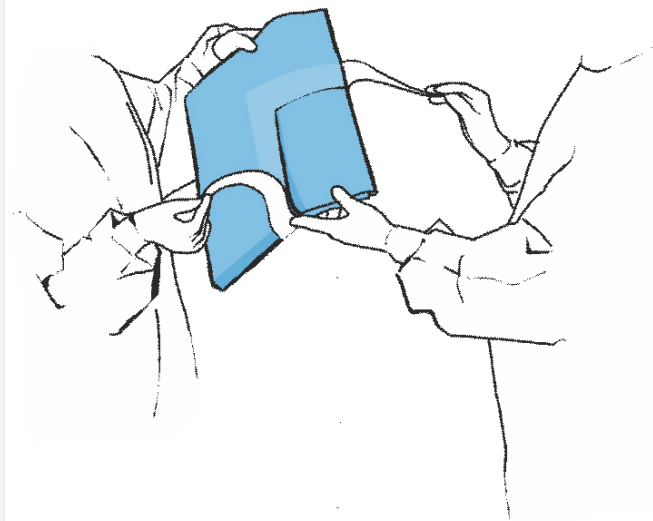

Удаляем защитную бумагу с отверстия второй основной простыни.


# Инструкция разложения комплекта для байпаса Matodrape

10

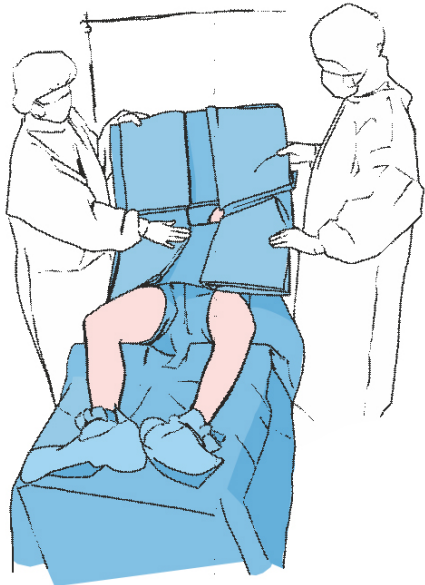


Приклеиваем к грудной клетке, обозначая таким образом операционное поле. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.

11

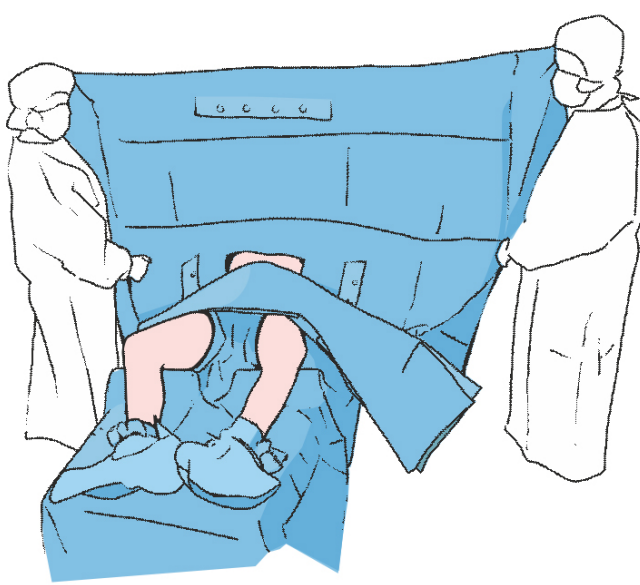


Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола, а затем разворачиваем верхнюю часть простыни в направлении головы пациента в соответствии с направлением стрелок (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем простыню через рамку или крепим на стойках, создавая таким образом анестезиологический экран.

12

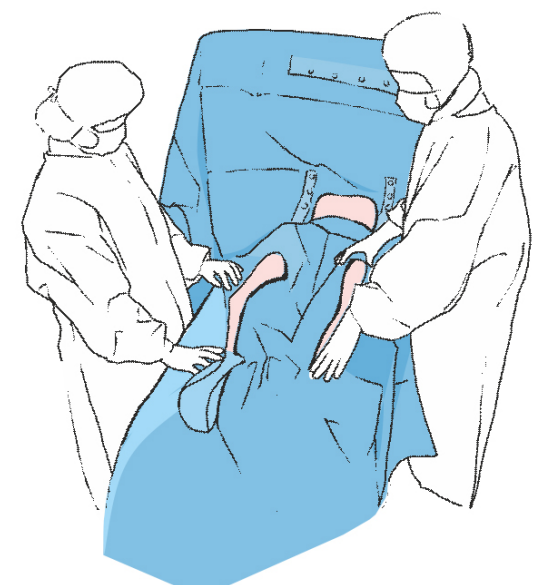

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обозначая границы операционного поля при помощи двух продолговатых отверстий.

13

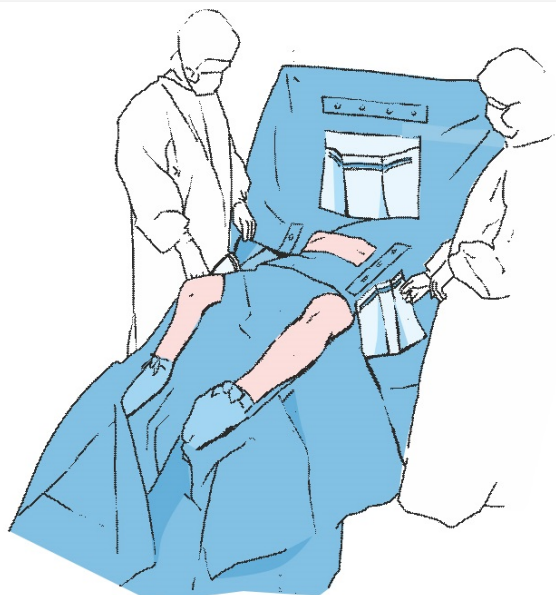

Далее, крепим пленочные карманы к простыне, удаляя защитную ленту с клеящего слоя.