



1

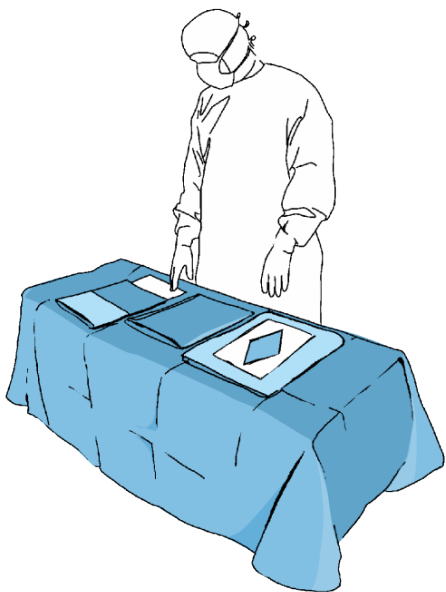


После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

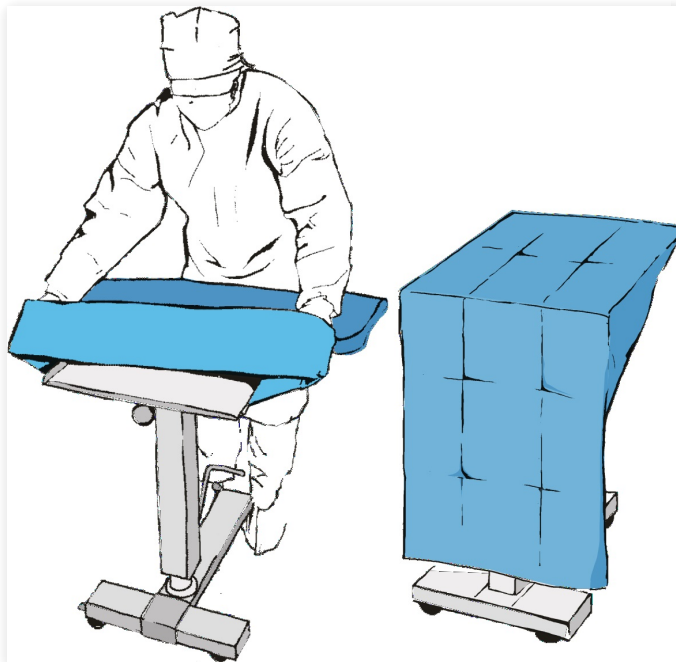

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3

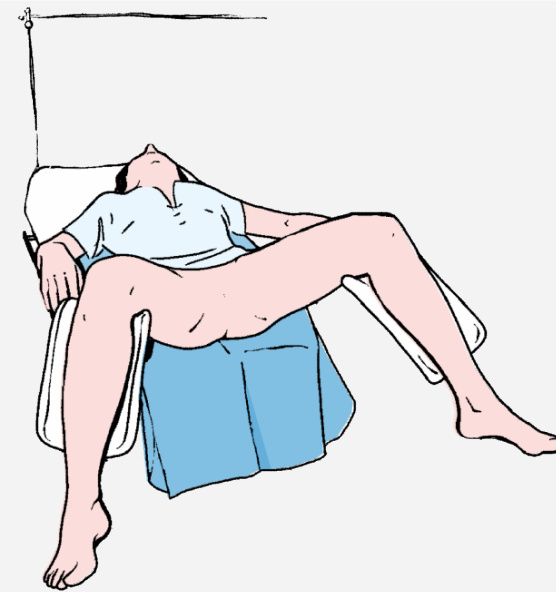

Меньшую салфетку размещаем под ягодицами пациента/пациентки, расположенного в урологической/гинекологической позиции.

Инструкция разложения комплекта для цистоскопии Matodrape

4

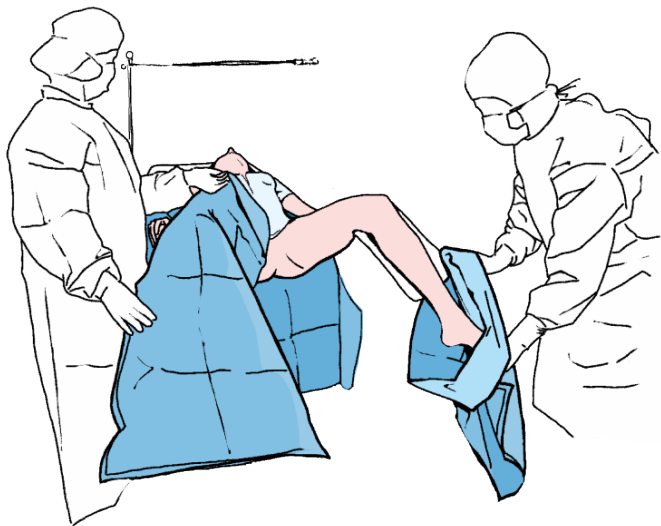

Натягиваем чехлы с манжетой на ноги пациентки.

5



Прежде чем разложить простыню на пациентке (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.


6



Удаляем защитную бумагу с главной простыни.


Инструкция разложения комплекта для цистоскопии Matodrape

7

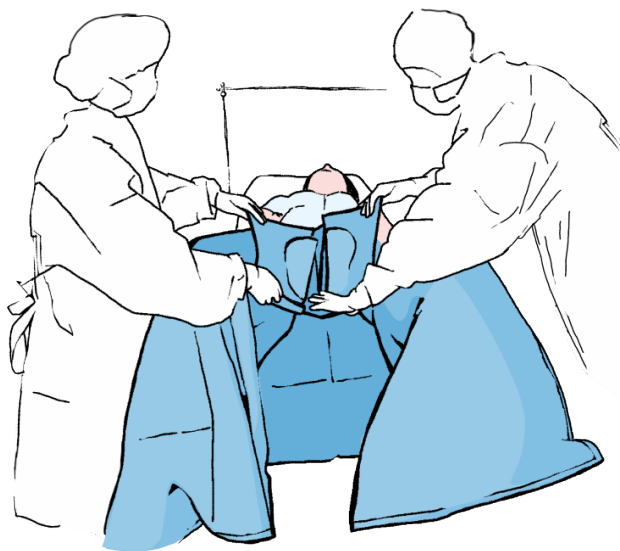

Приклеиваем простыню таким образом, чтобы не было складок, обозначая одновременно верхнюю и боковые границы операционного поля. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациентки.

8

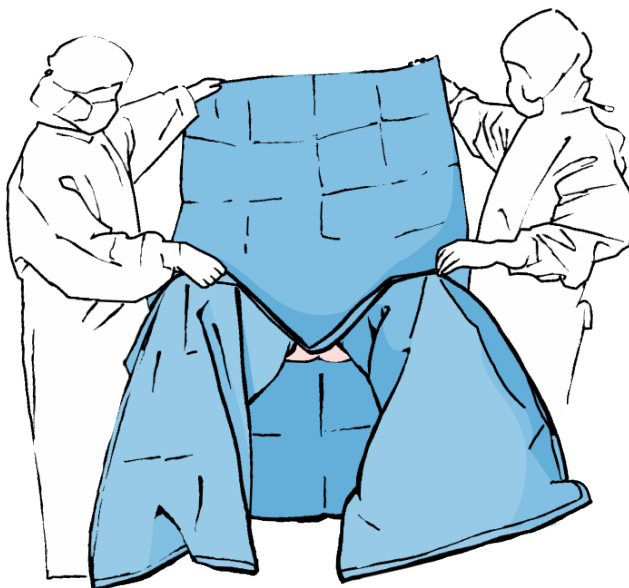

Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола, а затем разворачиваем верхнюю часть простыни в направлении головы пациента (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем простыню через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

9



Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, частично между ногами пациентки.