



1

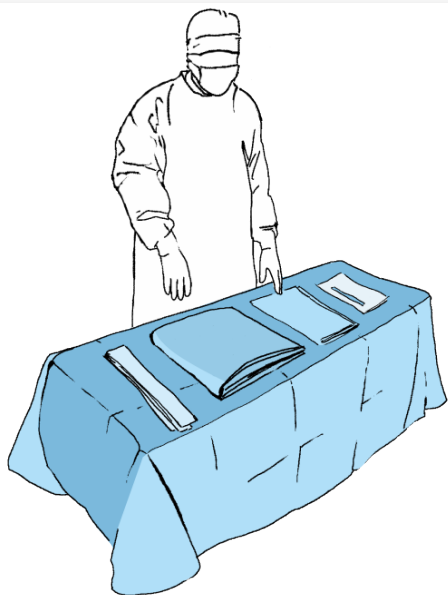

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

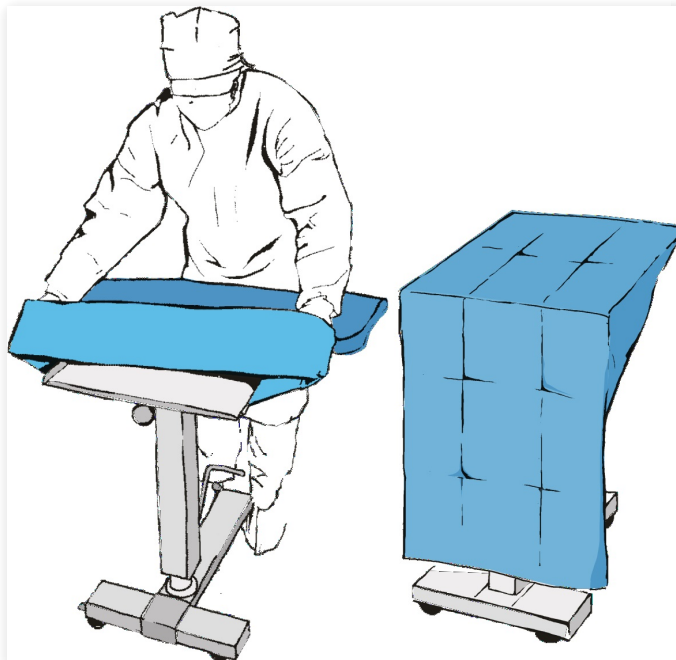

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3



Поднимаем вверх нижнюю конечность пациента, подлежащую медицинской процедуре, используя для этой цели прилагаемые полотенца для рук из нетканого материала.


Инструкция разложения комплекта для хирургии бедра Matodrape

4

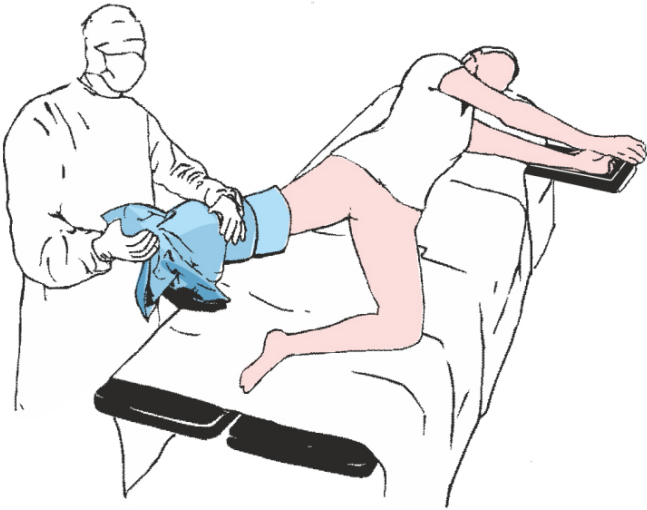


Натягиваем чехол на нижнюю конечность пациента ниже тазобедренного сустава.

5

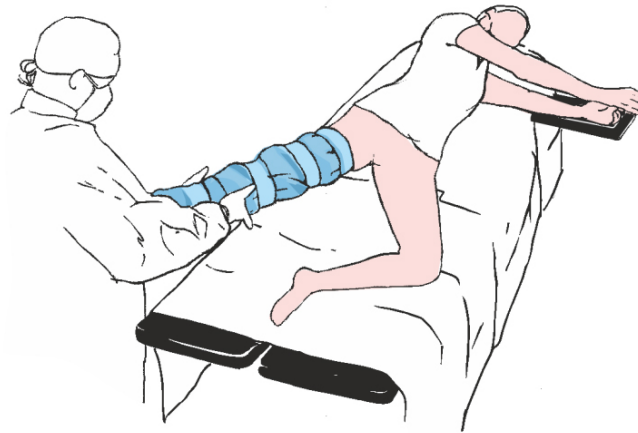

Фиксируем чехол при помощи прилагаемых самоклеящихся операционных лент.


6

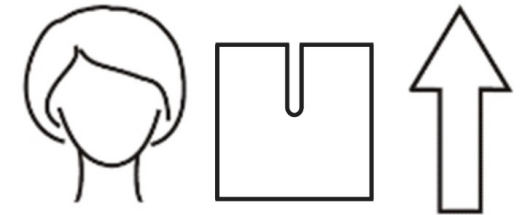

Прежде чем разложить простыню на пациенте (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.

Инструкция разложения комплекта для хирургии бедра Matodrape

7

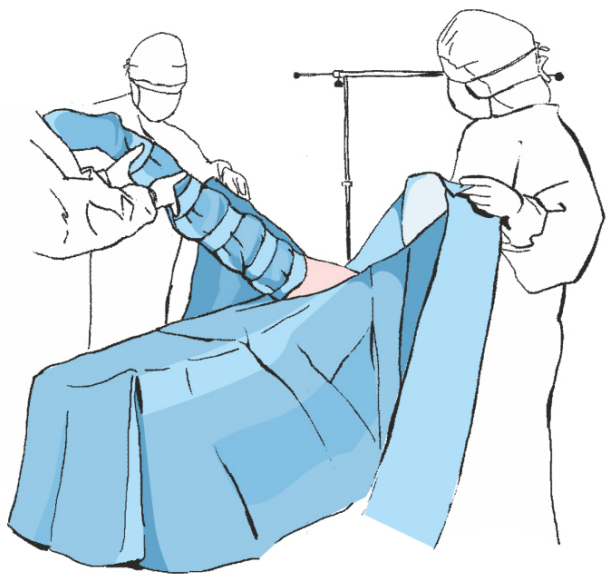


Размещаем простыню с отверстием в виде буквы U под бедром пациента. Удаляем защитную бумагу с короткого участка адгезивного края и плотно приклеиваем ее точно в области паха пациента. Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, прикрывая таким образом нижние конечности пациента.

8



Удаляем оставшуюся защитную бумагу и обклеиваем бедро в направлении головы пациента, обозначая таким образом боковые границы операционного поля. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.


9

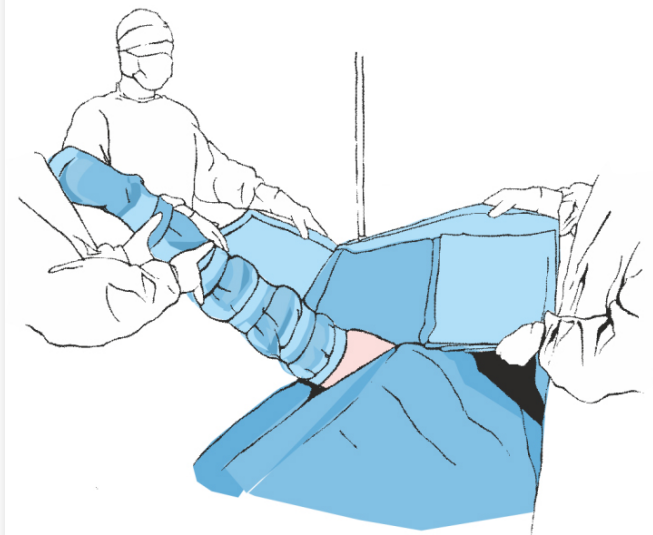

Удаляем защитную бумагу с верхней простыни. Приклеиваем простыню таким образом, чтобы не было складок, обозначая одновременно верхнюю границу операционного поля.


Инструкция разложения комплекта для хирургии бедра Matodrape

10

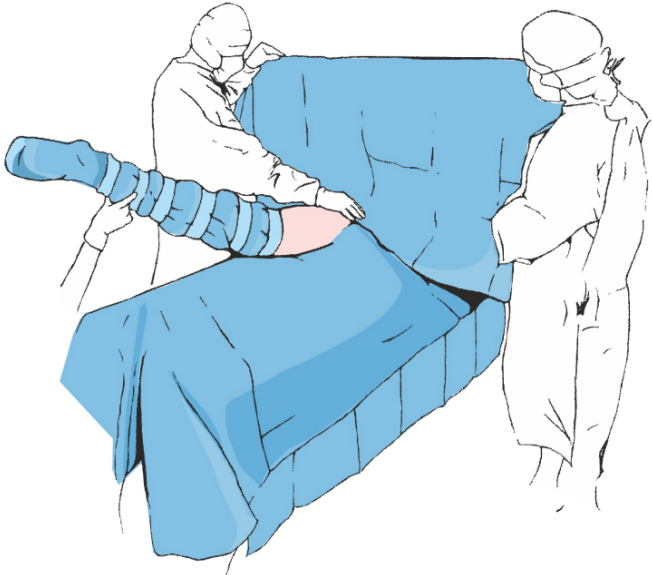

Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента. Разворачиваем простыню в соответствии с направлением стрелок (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем покрытие через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

11

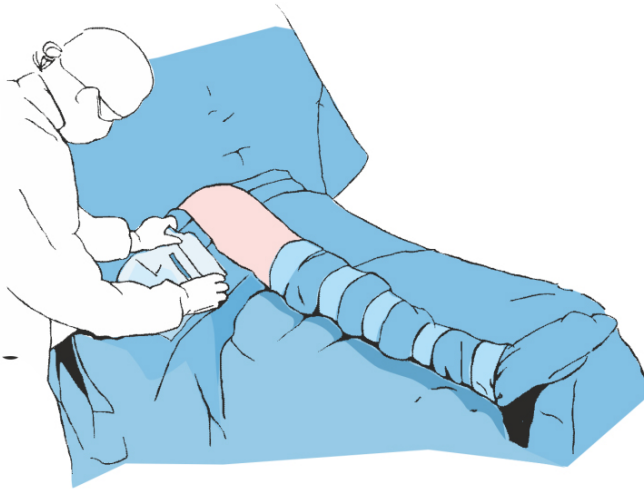

Крепим к простыне пленочный карман под операционным полем таким образом, чтобы жидкости из хирургической раны могли стекать непосредственно в карман.

12

