


1



После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

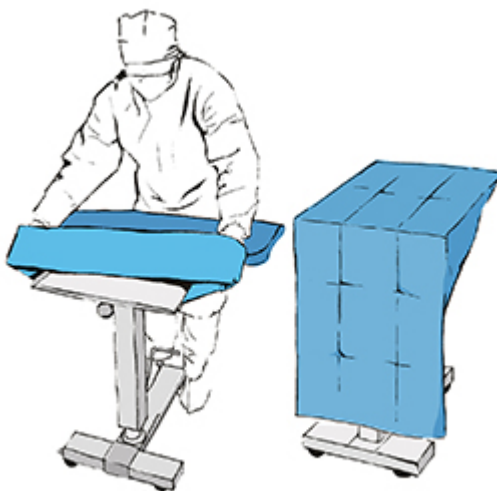

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3




Прежде чем разложить простыню на пациентке (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.

Инструкция разложения комплекта для краниотомии Matodrape

4

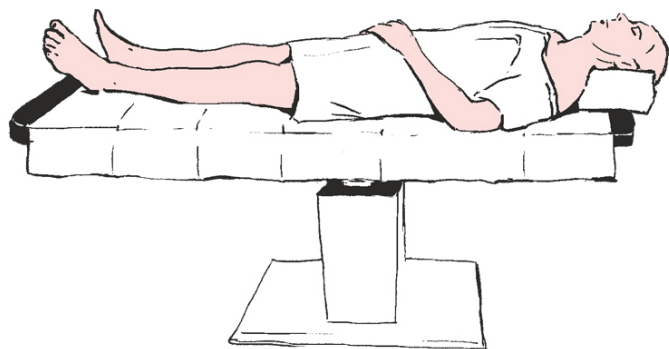


5

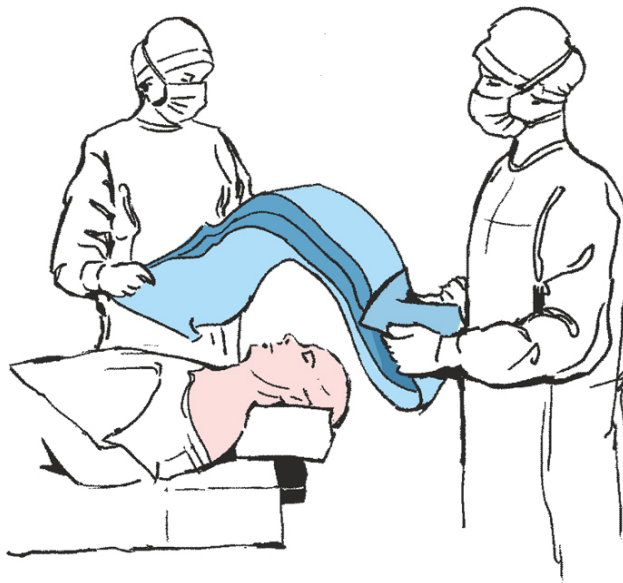

Вдвоем разворачиваем бока простыни над головой пациента таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола, ...


6

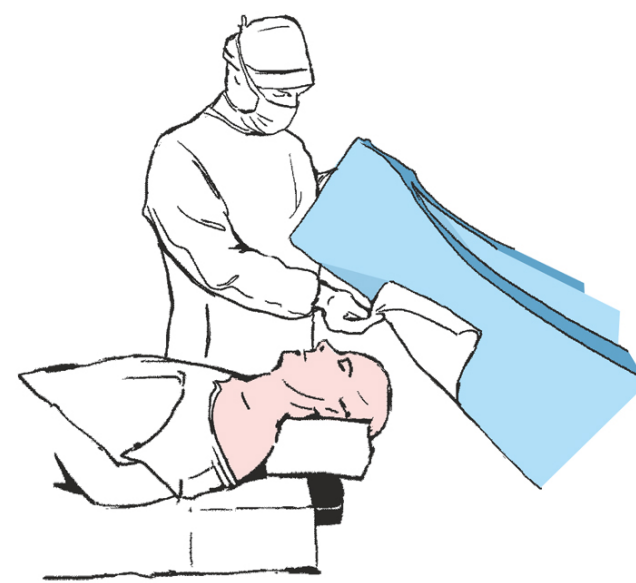

... далее удаляем защитную бумагу с хирургической пленки, которая находится в отверстии основной простыни ...


Инструкция разложения комплекта для краниотомии Matodrape

7

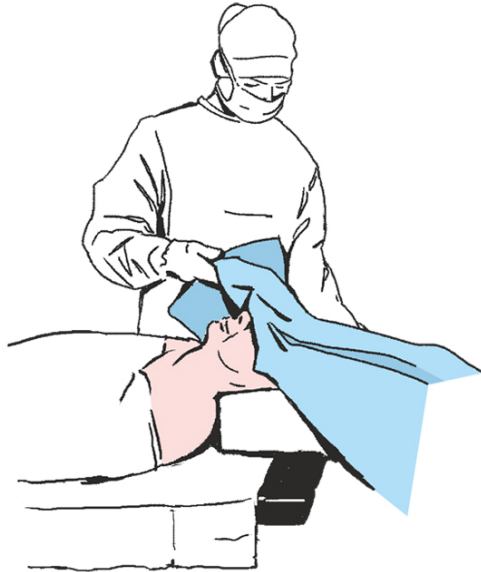

... и приклеиваем простыню, обозначая таким образом операционное поле.

8

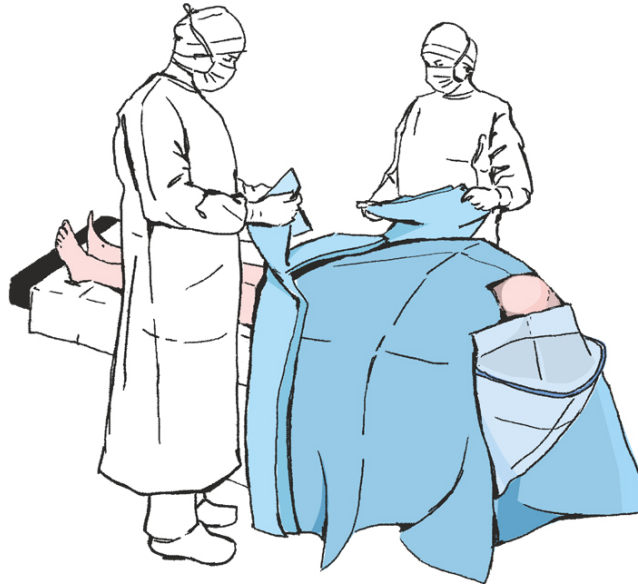

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента.


9



Следует нажать в области приклеивания простыни с хирургической пленкой, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента. Разворачиваем верхнюю часть простыни. При помощи моделирующего элемента формируем отверстие кармана для жидкостей.


Инструкция разложения комплекта для краниотомии Matodrape

10

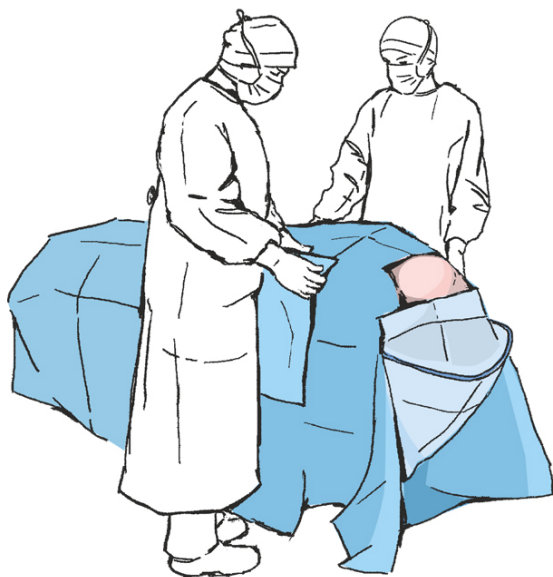


С правой и левой стороны операционного поля приклеиваем дополнительную защиту в виде простыней с адгезивными краями, предварительно удалив защитную бумагу.

11

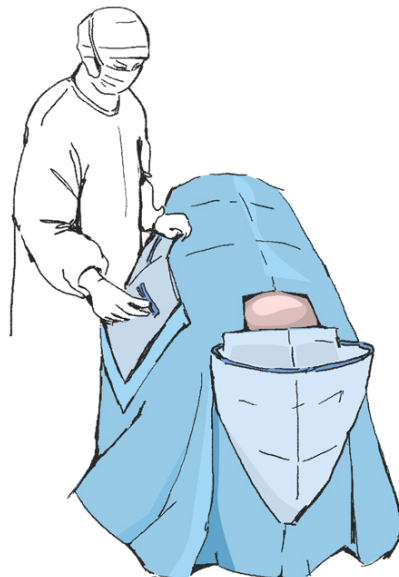


Сбоку простыни крепим пленочный карман таким образом, чтобы собирать в него жидкости, стекающие с операционной раны во время операции.

12

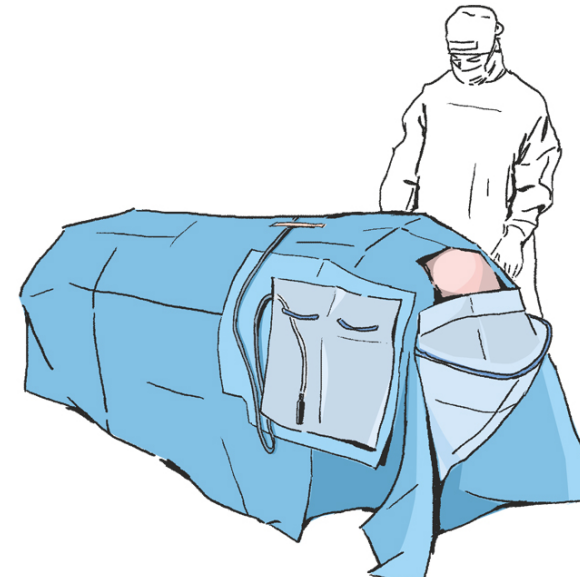

Крепим сверху простыни ленту с липучками для того, чтобы содержать в порядке кабели, используемые во время операции.

13

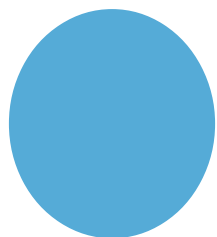

Крепим дренажную трубку к крану для отведения жидкостей в кармане для жидкостей.