



1

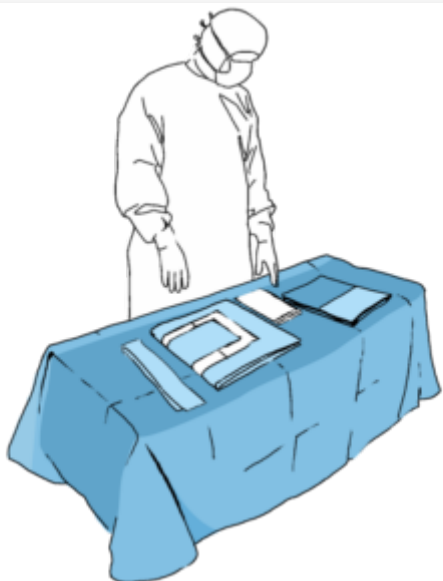

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

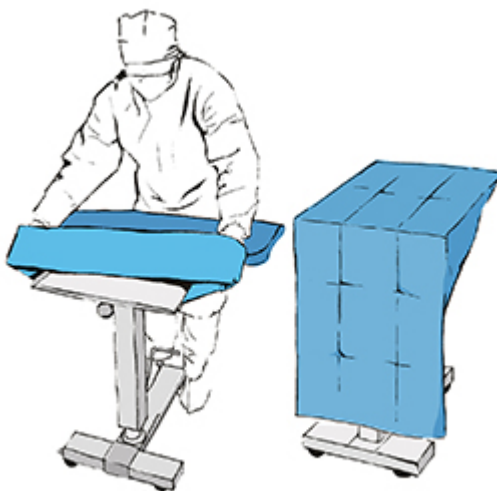

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3



Прежде чем разложить простыню на пациентке (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.


Инструкция разложения комплекта для лапаротомии Matodrape

4

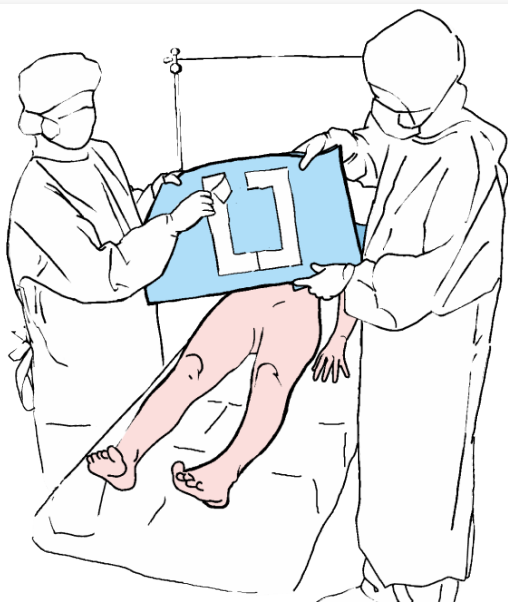


Удаляем защитную бумагу с главной простыни. Приклеиваем простыню таким образом, чтобы не было складок, обозначая одновременно верхнюю и боковые границы операционного поля. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.

5

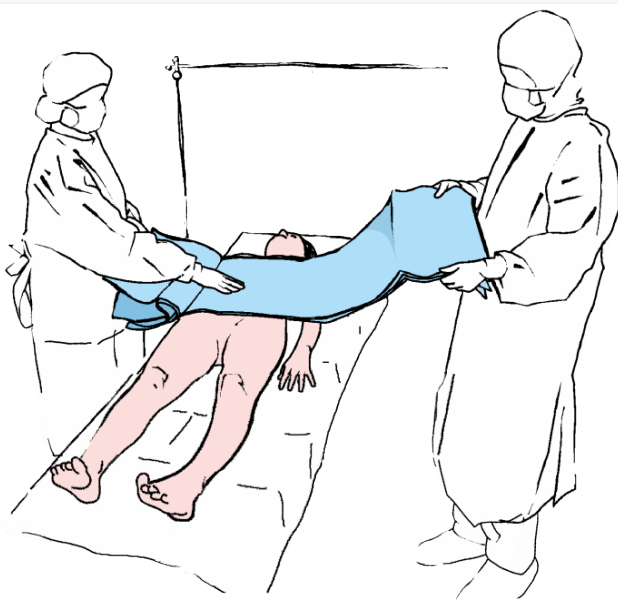


Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола.

6

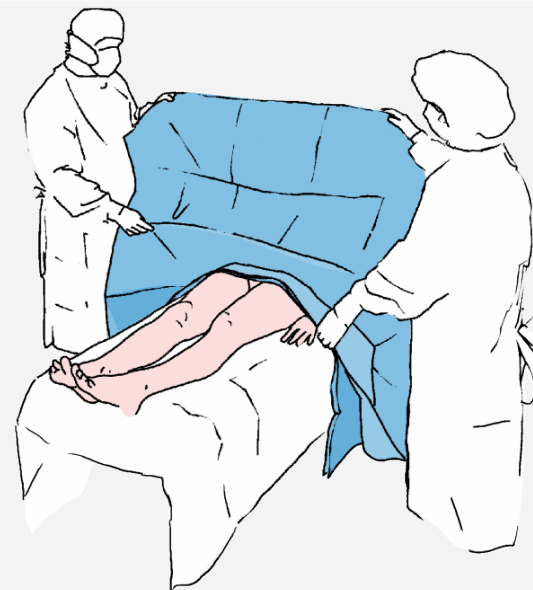

Верхнюю часть простыни в направлении головы пациента (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем простыню через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

7

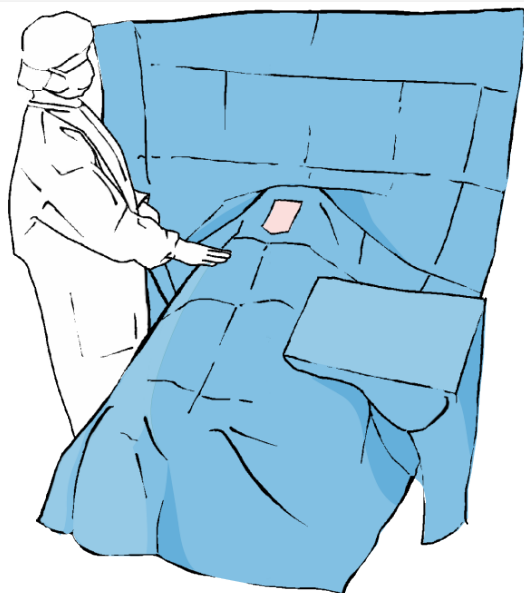

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, закрывая таким образом нижние конечности пациента.