



1

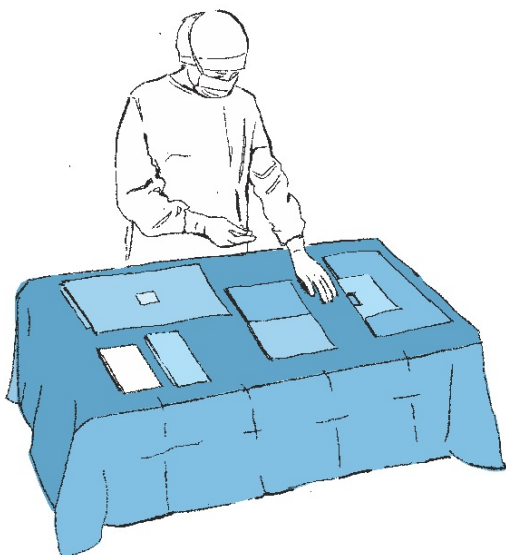


После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

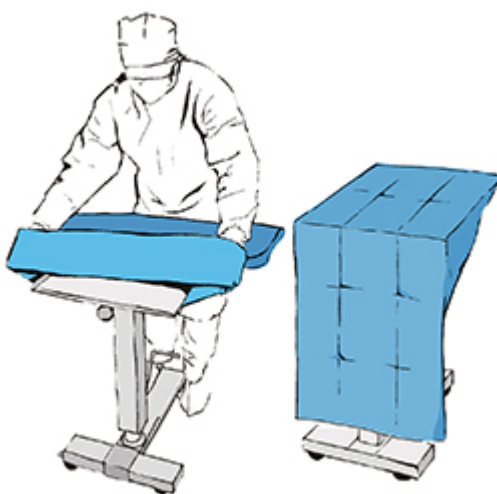

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3

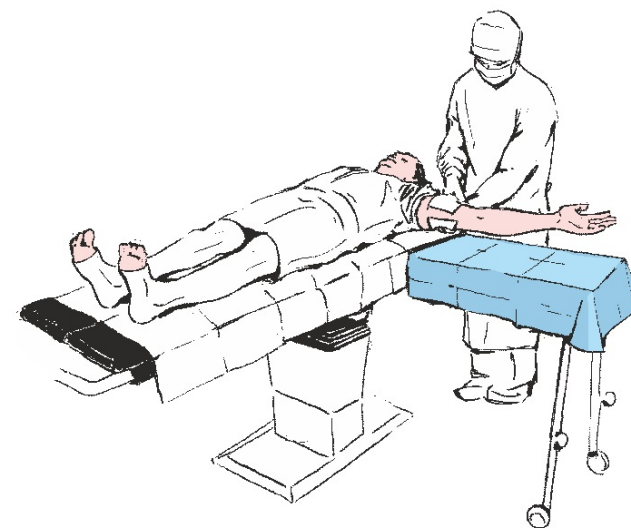

Подносим вверх верхнюю конечность пациента, используя для этого салфетки.


Инструкция разложения комплекта для операции на верхней конечности Matodrape

4

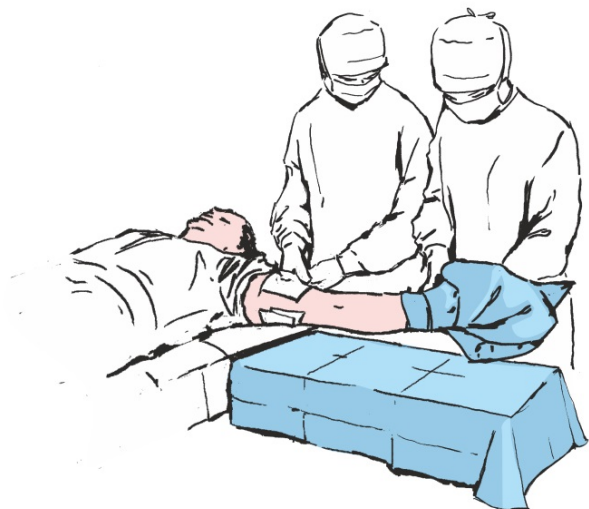

Одеваем чехол на верхнюю конечность пациента.

5

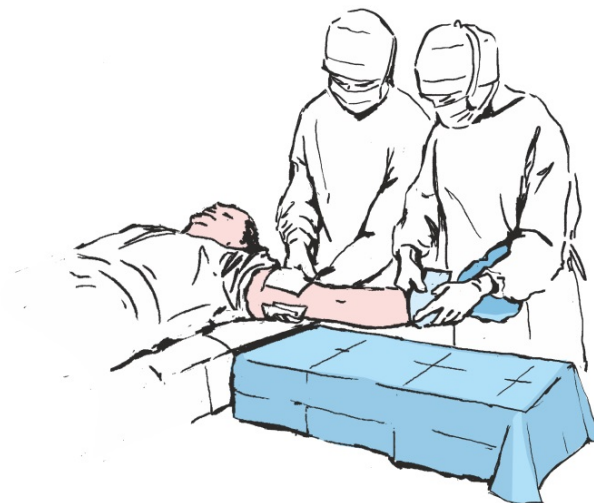

Закрепляем чехол самоклеящейся лентой, находящейся в комплекте.


6



Прежде чем разложить простыню на пациенте (обозначить операционное поле), следует обратить внимание на символы, находящиеся на простыне.


Инструкция разложения комплекта для операции на верхней конечности Matodrape

7

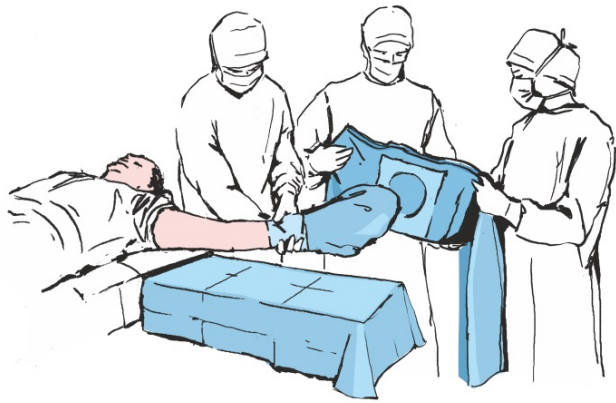


Продвигаем верхнюю конечность пациента сквозь отверстие с эластичным элементом в простыне.

8

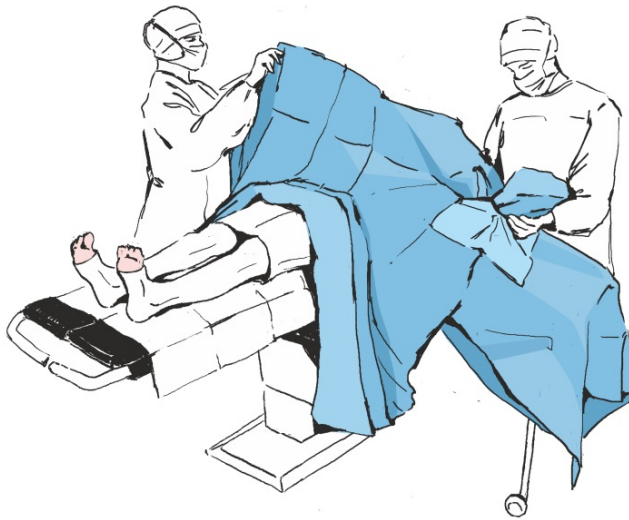

Прикрываем столик под верхнюю конечность боковой салфеткой, интегрированной с простыней.

9

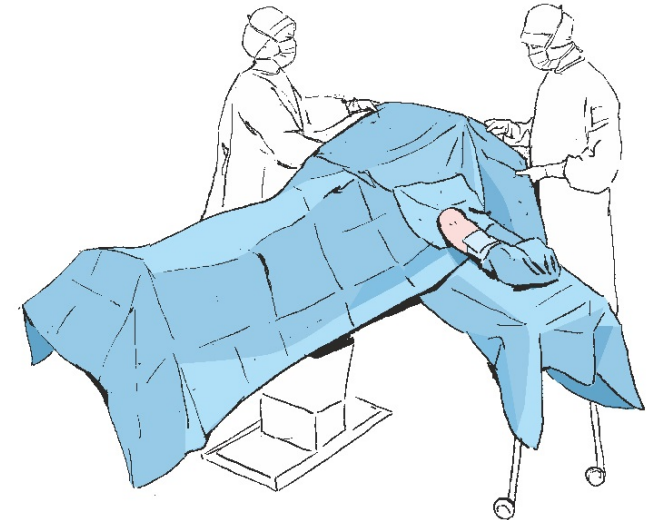

Разворачиваем нижнюю часть простыни, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента. Разворачиваем верхнюю часть простыни в направлении анестезиологического экрана. Перекидываем простыню через рамку или крепим на стойках, создавая таким образом анестезиологический экран.

Инструкция разложения комплекта для операции на верхней конечности Matodrape

10

