



1

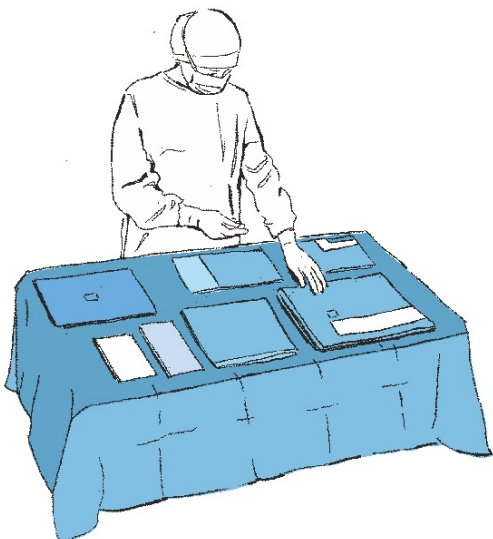


После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

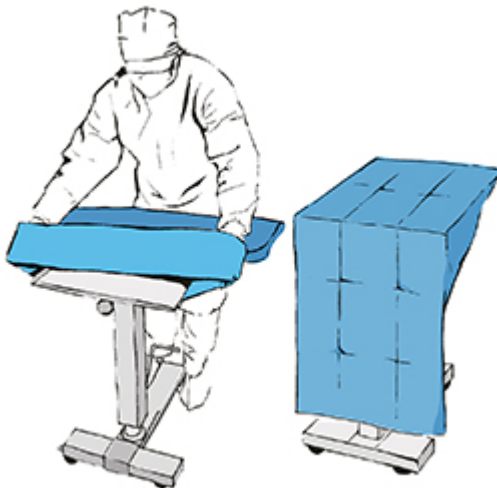

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.

3

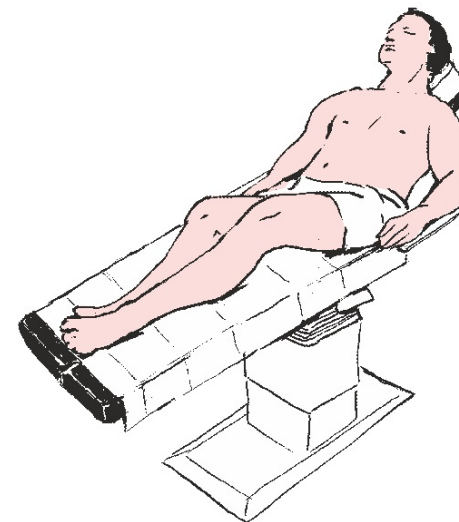


Инструкция разложения комплекта для операций на акромиально-ключичном суставе Matodrape

4




Подносим вверх верхнюю конечность пациента, используя для этого салфетки, находящиеся в комплекте и размещаем вспомогательную простыню под конечностью.

5

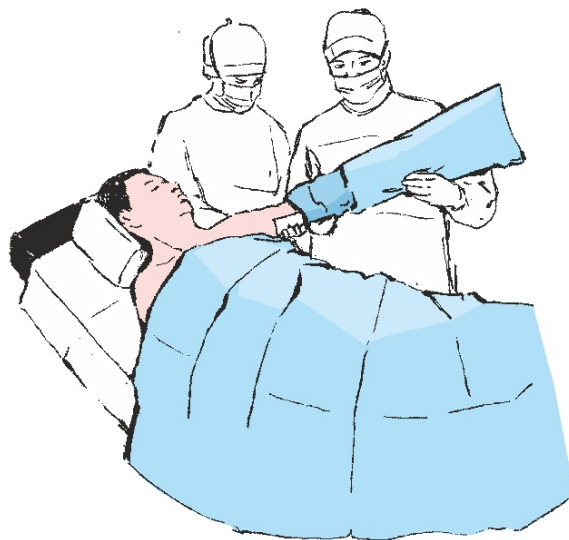

Одеваем чехол на верхнюю конечность пациента до плеча.


6

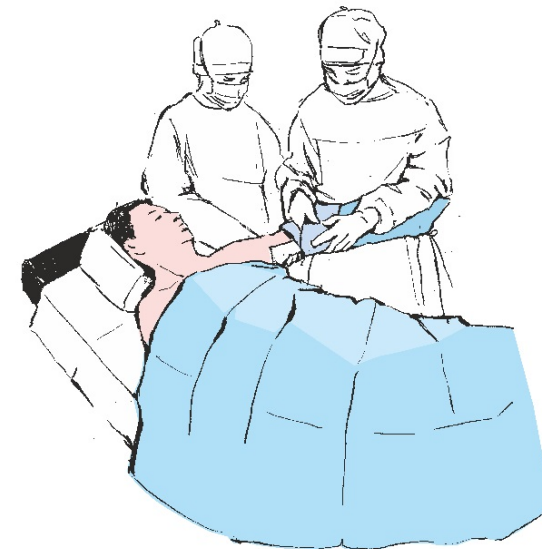

Закрепляем чехол самоклеящимися лентами, находящимися в комплекте.

Инструкция разложения комплекта для операций на акромиально-ключичном суставе Matodrape

7

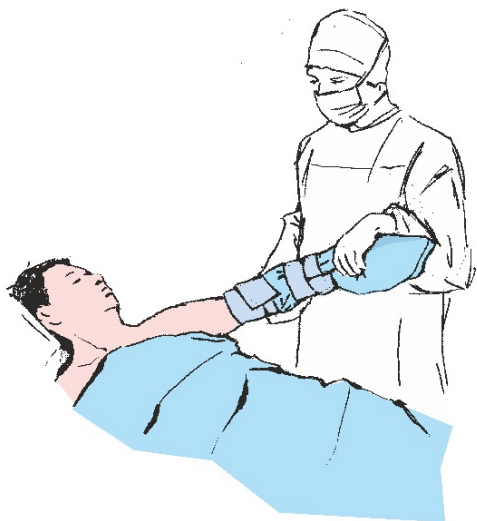

8



Прежде чем разложить простыню на пациенте, следует обратить внимание на символы, находящиеся на простыне.

9



Далее следует положить простыню с вырезом в виде буквы „U” под плечо пациента.

Инструкция разложения комплекта для операций на акромиально-ключичном суставе Matodrape

10




Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента.

11



Удаляем защитную бумагу с более короткого отрезка самоклеящейся ленты и приклеиваем точно под подмышкой пациента.


12

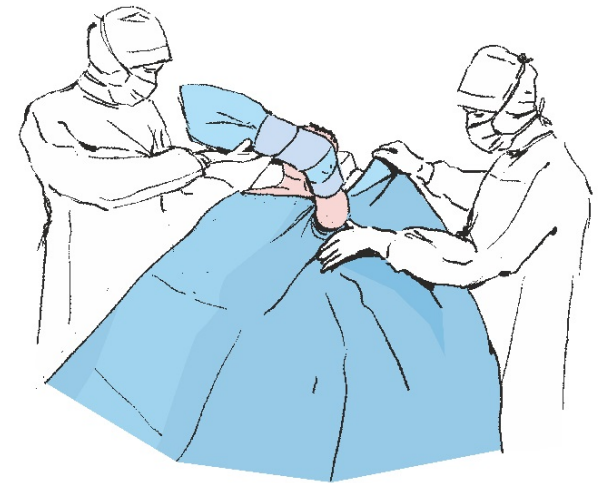

Удаляем защитную бумагу с оставшихся самоклеящихся лент и обклеиваем плечо в направлении головы пациента, обозначая таким образом боковые границы операционного поля. Следует нажать в области самоклеящихся лент, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.

Инструкция разложения комплекта для операций на акромиально-ключичном суставе Matodrape

13

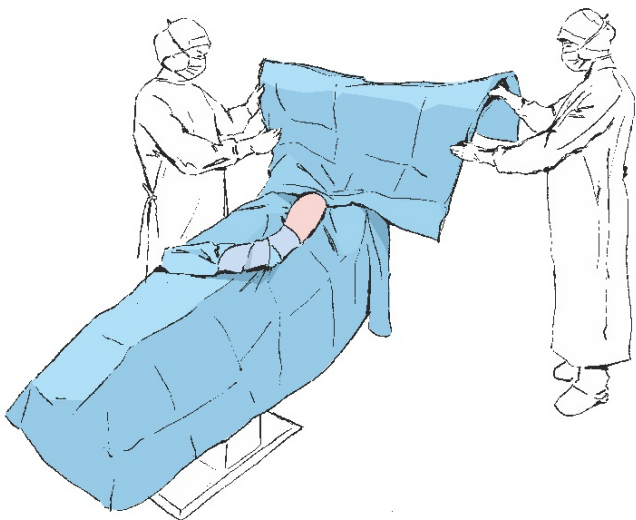

Удаляем защитную бумагу с верхней простыни и приклеиваем ее над плечом, обозначая таким образом верхнюю границу операционного поля. Следует нажать в области самоклеящихся лент. Разворачиваем простыню в направлении анестезиологического экрана. Перекидываем простыню через рамку или крепим на стойках, создавая таким образом анестезиологический экран.

14

