



1

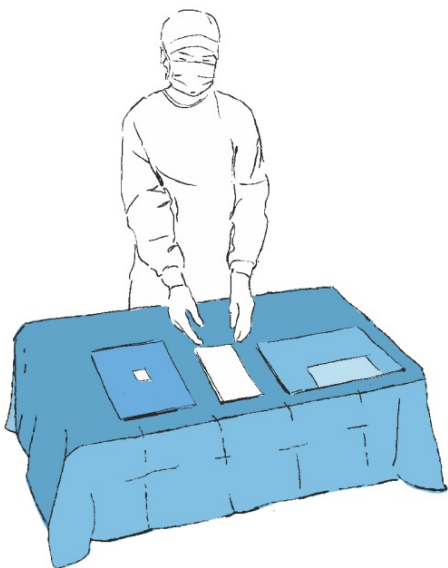

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

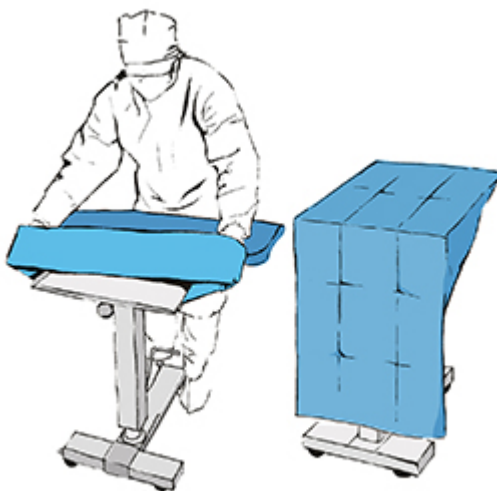

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3



Прежде чем разложить простыню на пациентке (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.

# Инструкция разложения комплекта для операции на кисте и стопе Matodrape

4

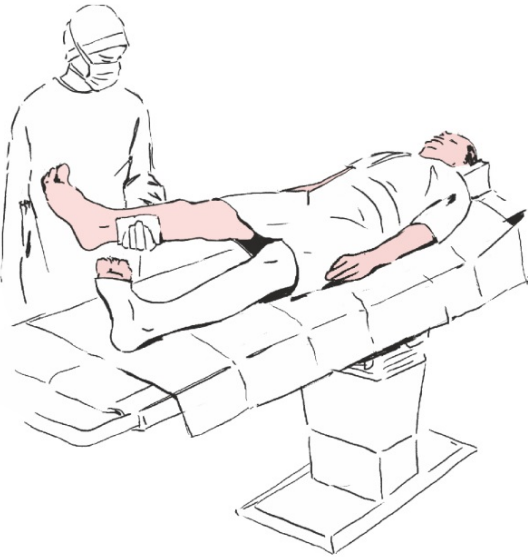

Подносим вверх верхнюю конечность пациента, используя для этого салфетки.

5




Продвигаем верхнюю конечность пациента сквозь отверстие с эластичным элементом в простыне.

6



# Инструкция разложения комплекта для операции на кисте и стопе Matodrape

7

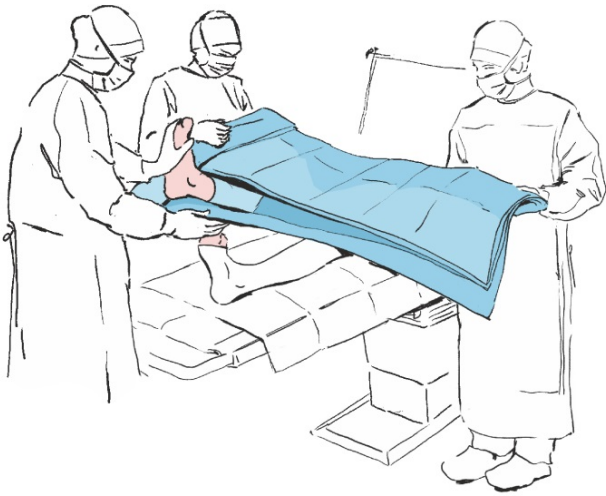

Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола, а затем разворачиваем верхнюю часть простыни в направлении головы пациента (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем простыню через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

8



Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента.

9

