



1

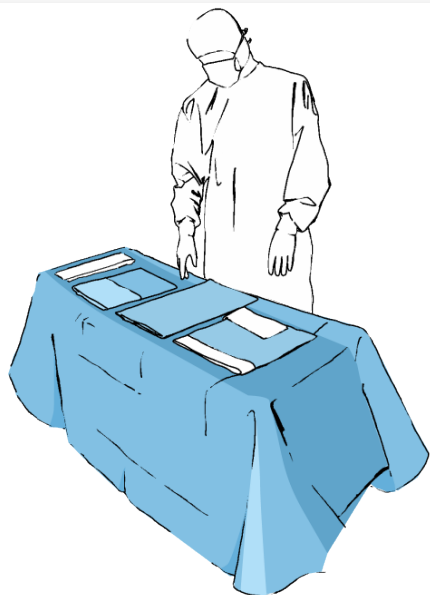

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

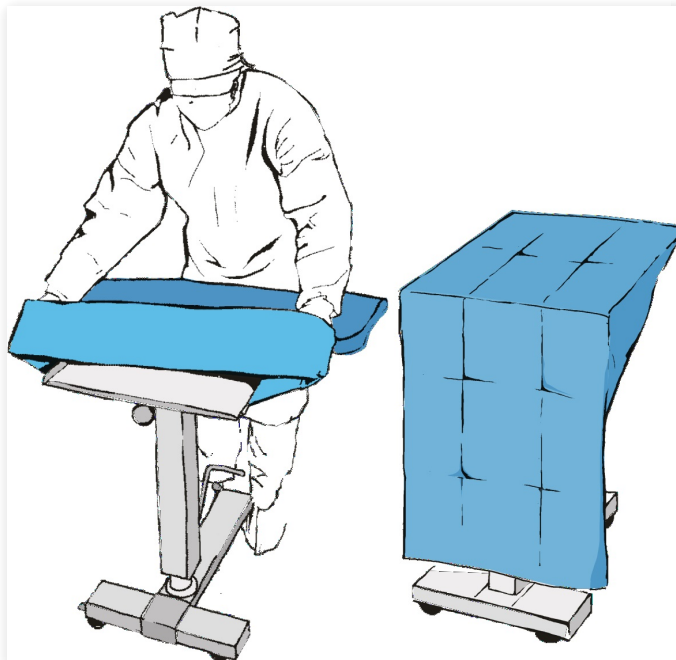

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3



Удаляем защитную бумагу с нижней простыни (с адгезивным краем).


Инструкция разложения комплекта для струмектомии Matodrape

4

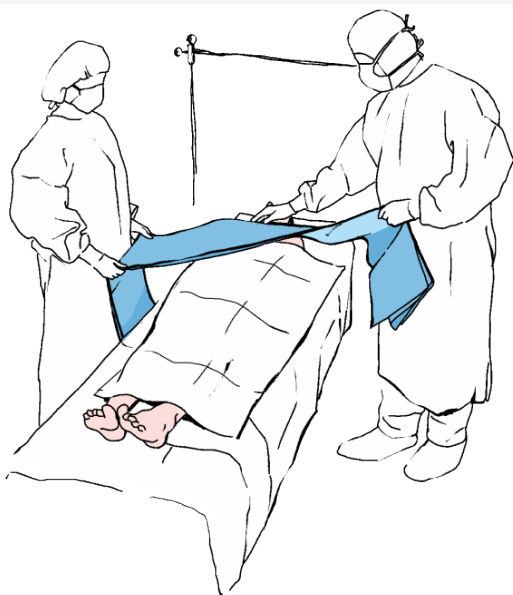


Раскладывая простыню на боки, приклеиваем ее в области грудной клетки, обозначая таким образом нижнюю границу операционного поля.

5

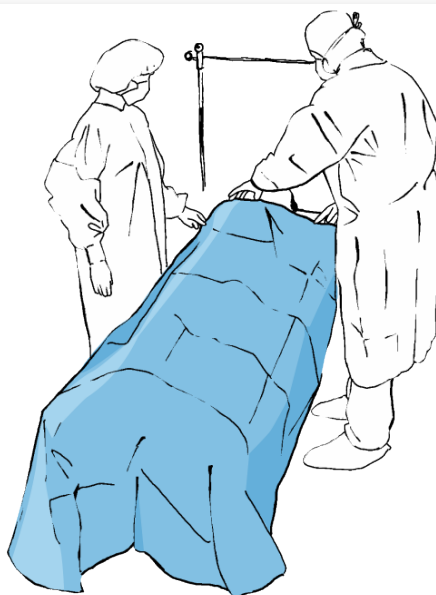

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, закрывая таким образом нижние конечности пациента.

6

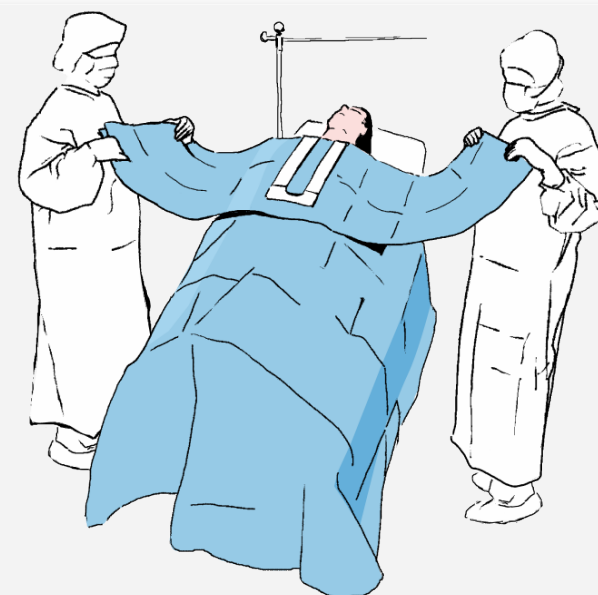

На нижней простыне раскладываем простыню с отверстием в виде буквы U таким образом, чтобы адгезивный край был наверху.


Инструкция разложения комплекта для струмектомии Matodrape

7




Отклеиваем защитную бумагу.

8

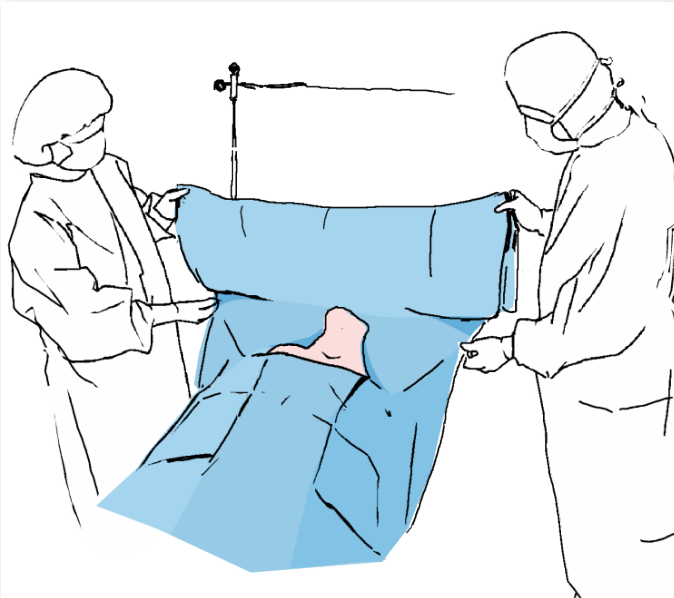

Приклеиваем простыню таким образом, чтобы не было складок, обозначая одновременно верхнюю и боковые границы операционного поля. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента. Разворачиваем простыню в соответствии с направлением стрелок (в направлении анестезиологического экрана).

9

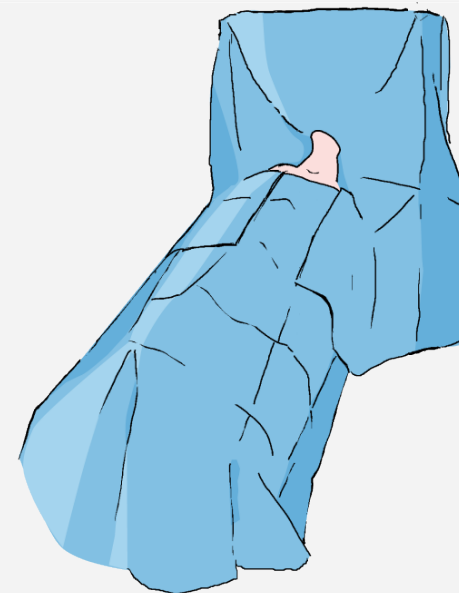

Перекидываем покрытие через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.