



1

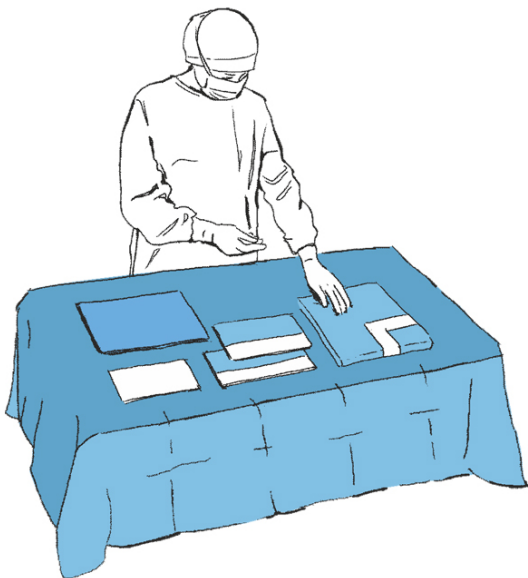

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

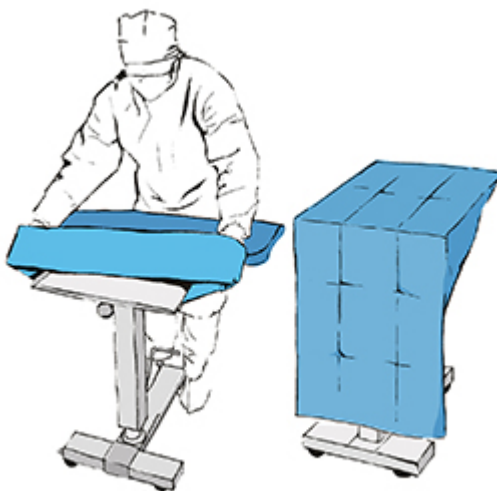

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3




Прежде чем разложить простыню на пациентке (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.

Инструкция разложения комплекта для торакотомии Matodrape

4

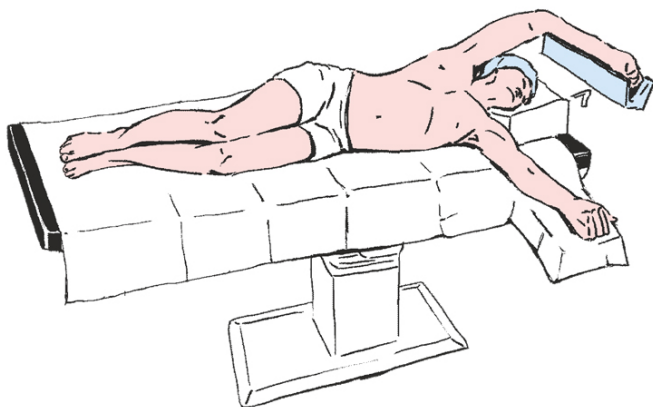


5

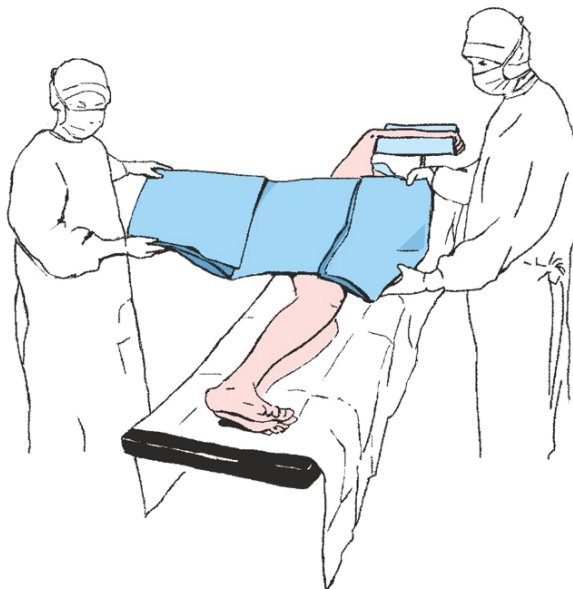

Раскладываем простыню с вырезом в виде буквы „U” над пациентом.


6

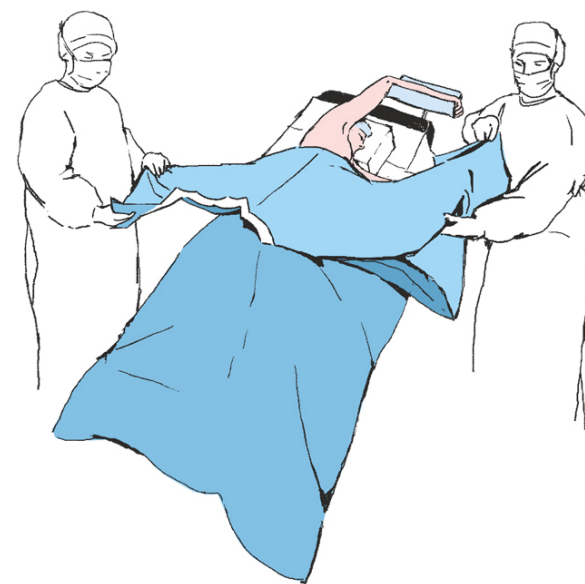

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента.

Инструкция разложения комплекта для торакотомии Matodrape

7

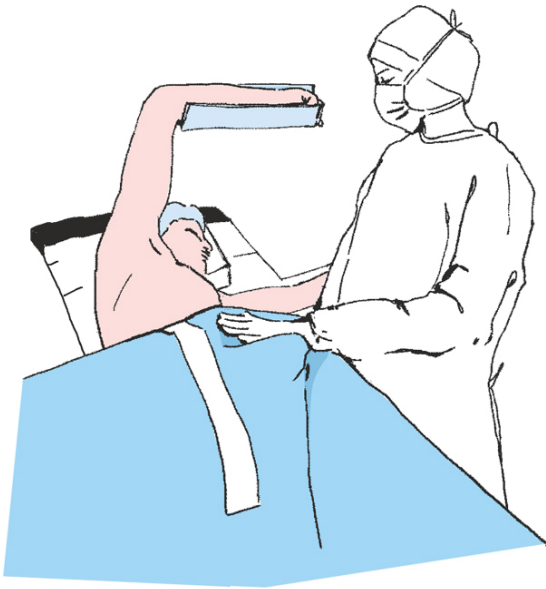


Удаляем защитную бумагу с короткой части адгезивной ленты и приклеиваем ее к нижней части грудной клетки пациента.

8



Удаляем остальные защитные ленты и обклеиваем бок грудной клетки в направлении головы пациента, обозначая таким образом нижние и боковые границы операционного поля. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.

9

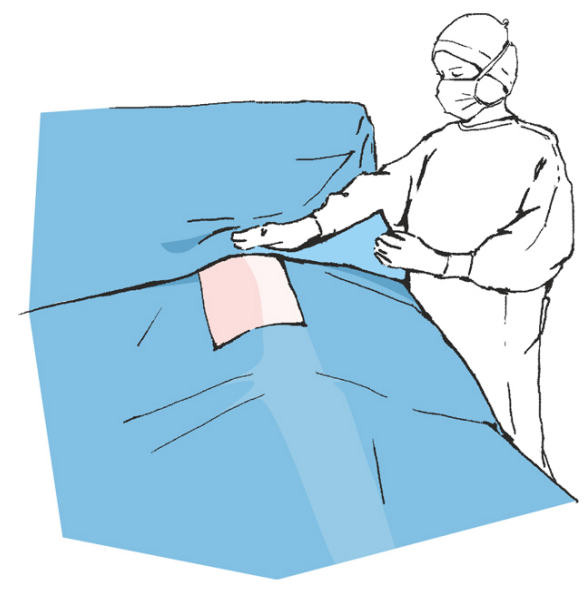

Удаляем защитную ленту с верхней простыни и приклеиваем простыню к верхней части грудной клетки. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента. Разворачиваем простыню в соответствии со стрелками (в направлении анестезиологического экрана).

10

