



1

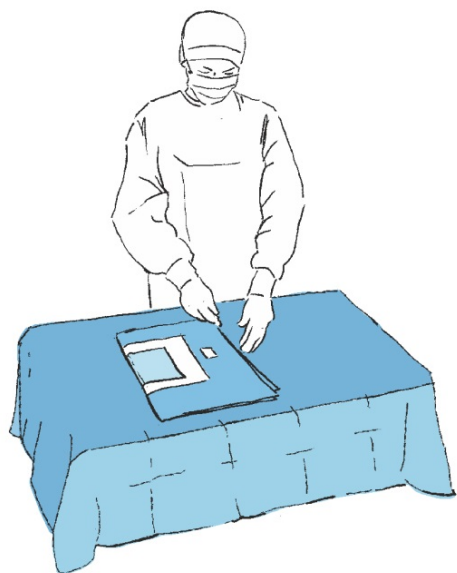

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

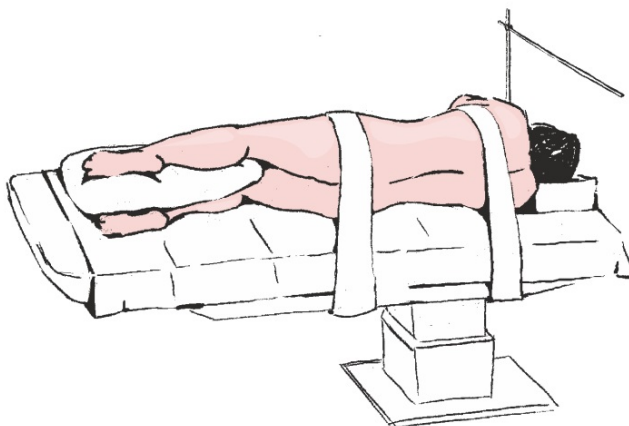


3



Прежде чем разложить простыню на пациенте (то есть обозначить операционное поле), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.


Инструкция разложения комплекта для урологии (PCNL) Matodrape

4

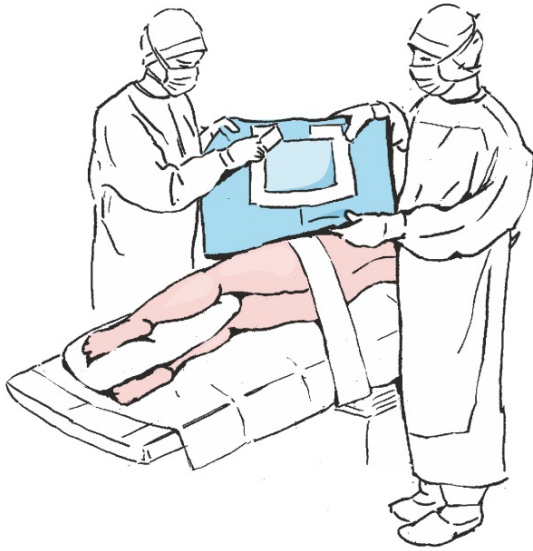


Вдвоем разворачиваем бока простыни над головой пациента таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола, далее удаляем защитную бумагу с отверстия основной простыни и приклеиваем простыню, обозначая таким образом операционное поле.

5

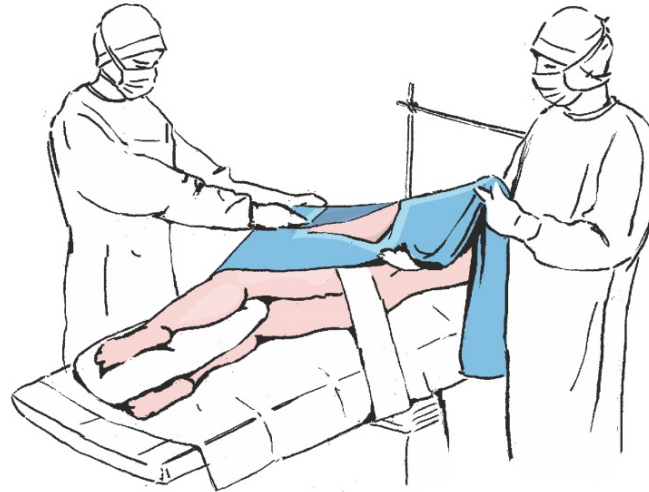

Следует нажать в области приклеивания простыни, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.


6

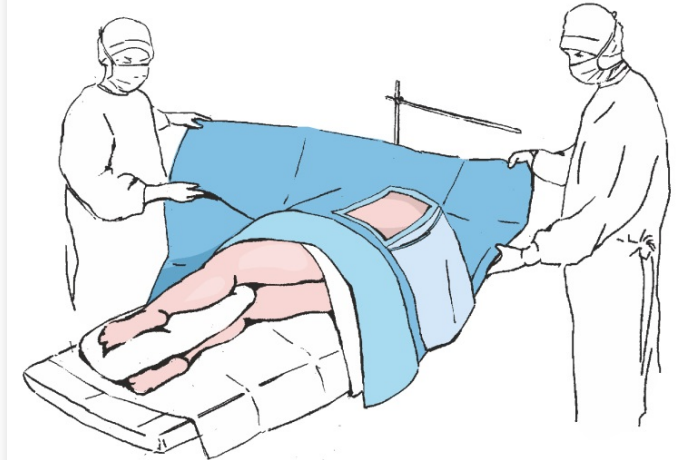

Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола, а затем разворачиваем верхнюю часть простыни в направлении головы пациента (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем простыню через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

Инструкция разложения комплекта для урологии (PCNL) Matodrape

7

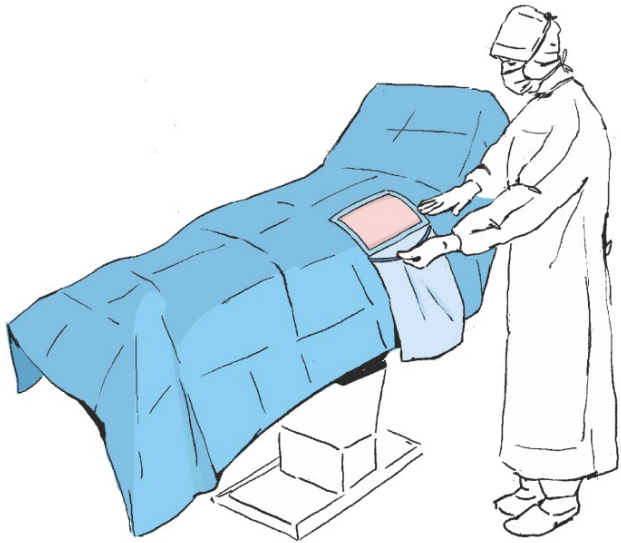

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента. При помощи моделирующего элемента формируем отверстие кармана для жидкостей.

8

