



1

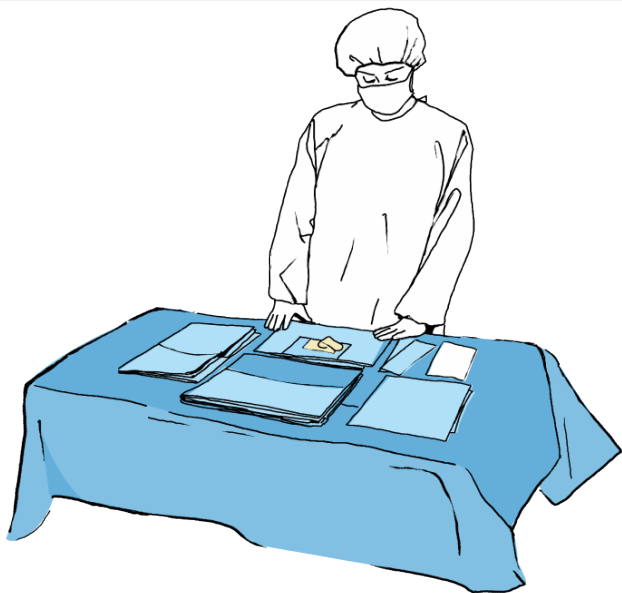


После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

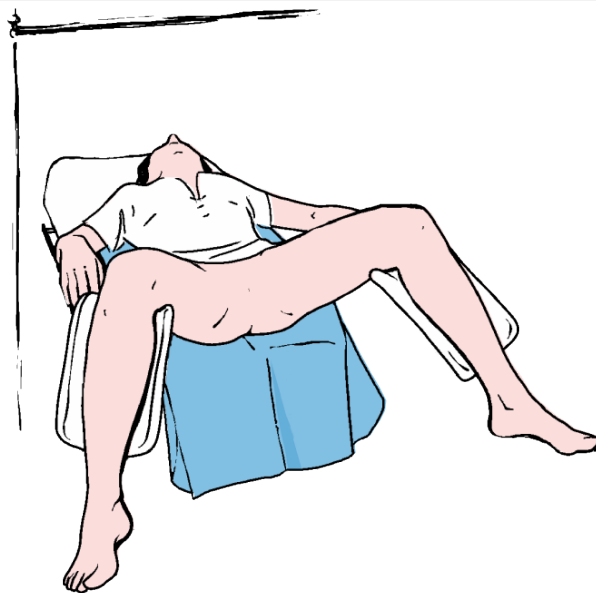

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.


3

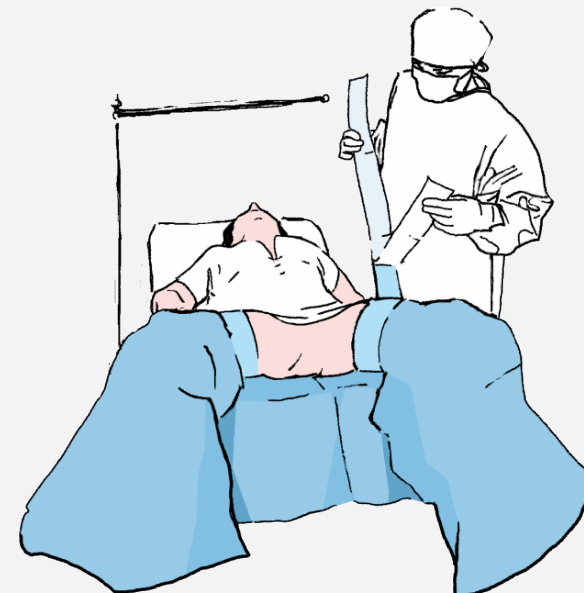

Меньшую салфетку размещаем под ягодицами пациента, расположенного в урологической позиции.

Инструкция разложения комплекта для урологии ТУР Matodrape

4

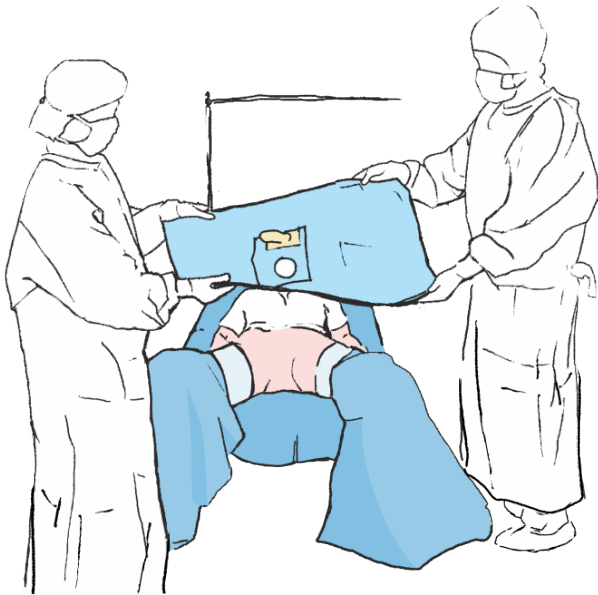


Натягиваем чехлы с манжетой на ноги пациента и фиксируем их при помощи операционных самоклеящихся лент.

5



Прежде чем разложить простыню на пациенте (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.


6

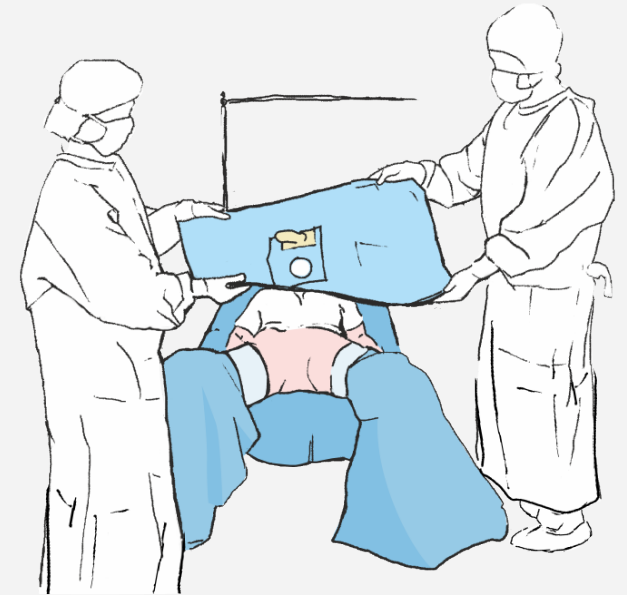

Частично раскладываем основную простыню на пациенте, подгоняя отверстия под соответствующие места операционного поля и кладем простыню на пациенте обозначая тем самым операционное поле.

Инструкция разложения комплекта для урологии ТУР Matodrape

7

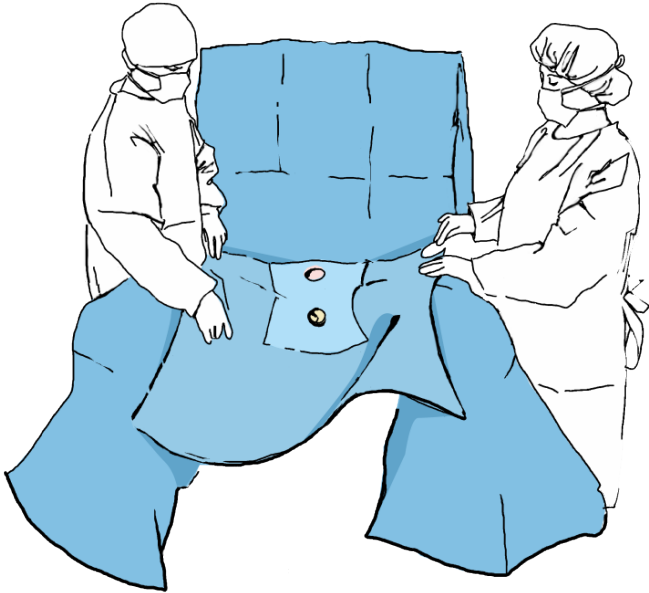

Разворачиваем бока простыни, чтобы они свободно свисали с операционного стола. Разворачиваем верхнюю часть простыни в направлении головы пациента, перекидываем через рамку, создавая анестезиологический экран. Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца стола, частично между ногами пациента.

8

