



1

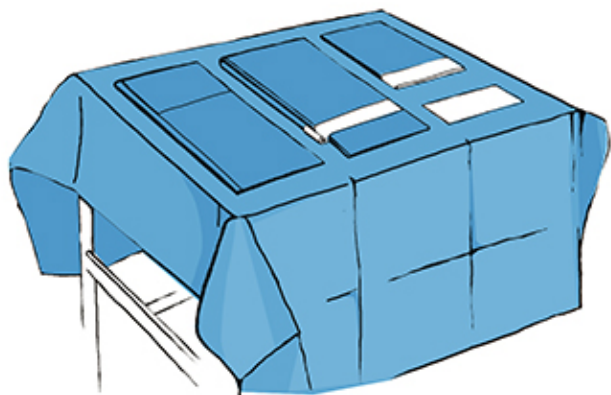

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта. Обратите внимание на символы, всказывающие в каком направлении следует раскладывать простыни.

2

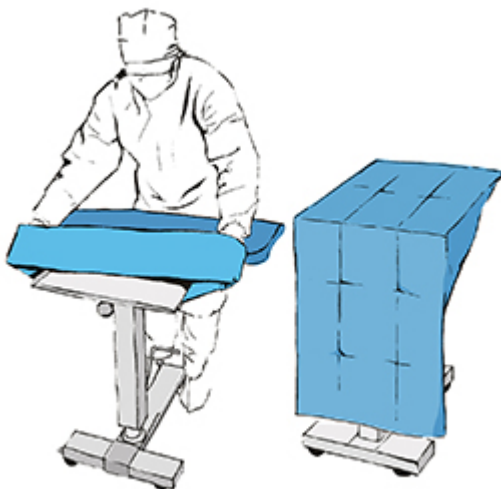

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Mayo.


3



Одеваем чехол на ногу пациента, под колено, закрепляя самоклеющимися лентами.


# Инструкция разложения комплекта для коленной артроскопии Matodrape

4

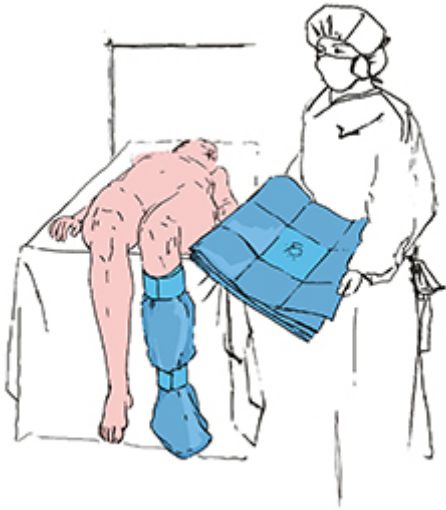


Разворачиваем простыню, которая сложена на половину. Простыня сложена таким образом, что отверстие с эластичным элементом видно сразу.

5

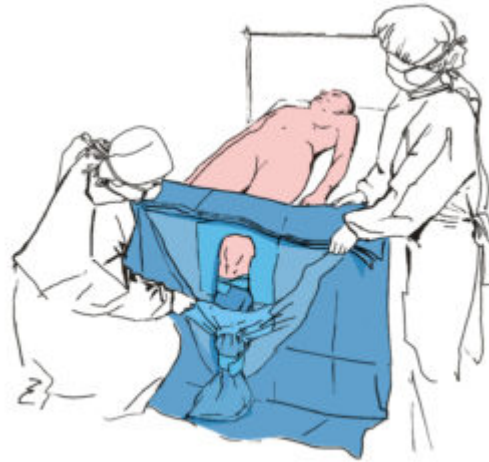

Продвигаем нижнюю конечность сквозь отверстие с эластичным элементом в простыне (на высоте лодыжки) и через отверстие с эластичным элементом в кармане для сбора жидкостей (на высоте голени).

6

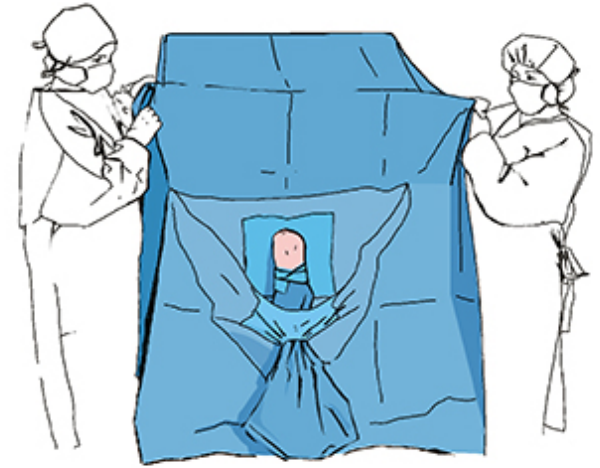

Раскладываем простыню на пациенте. Со стороны головы, крепим простыню к анестезиологическому экрану.