



1

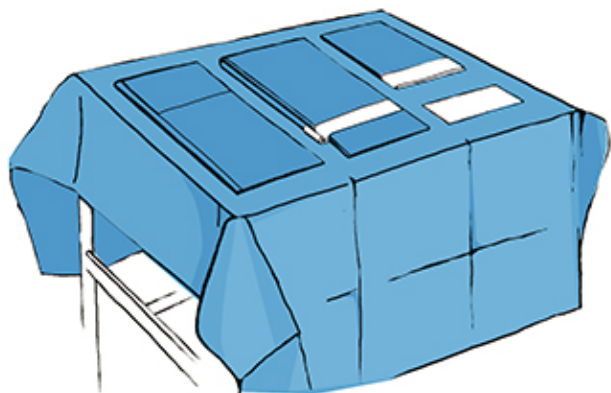

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта. Обратите внимание на символы, всказывающие в каком направлении следует раскладывать простыни.

2

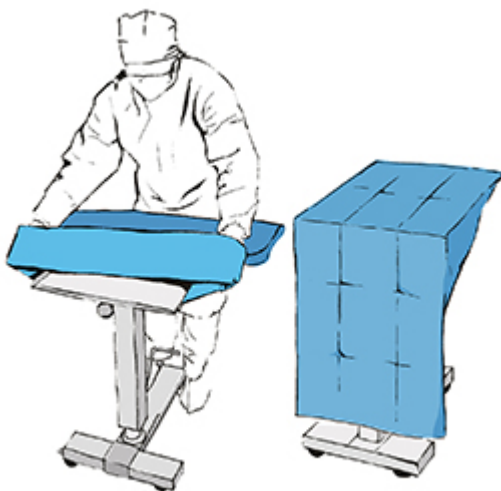

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Mayo.


3



Отклеиваем защитную ленту с нижней простыни.


Инструкция разложения универсального комплекта Matodrape

4

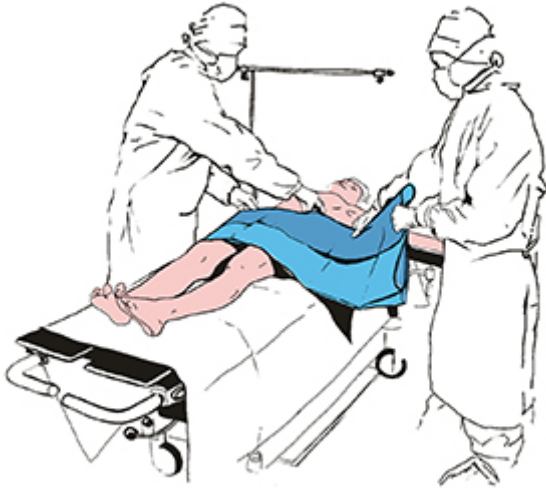


Крепим простыню к телу пациента, обозначая нижнюю границу операционного поля. Оставшейся частью простыни закрываем ноги.

5

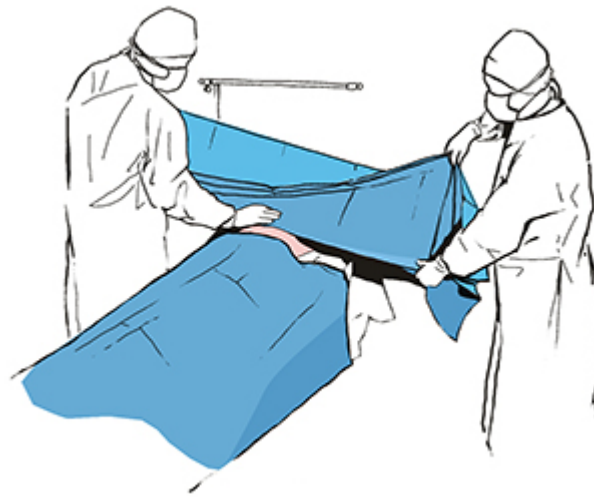

Верхнюю границу операционного поля ограждаем следующим способом: приклеиваем простыню со стороны головы. После этого, разворачиваем простыню и крепим к анестезиологическому экрану.

6

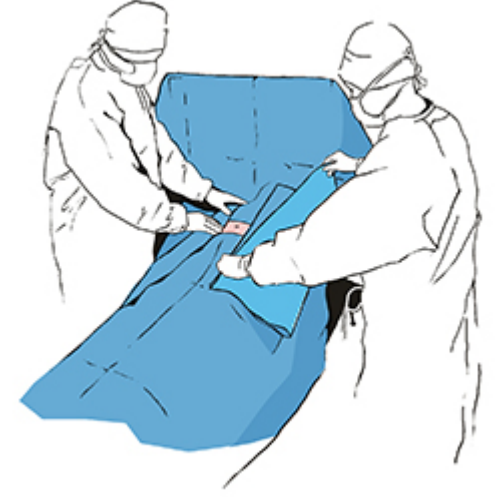

Крепим боковые простыни, обозначив границы операционного поля.