

Снаружи покрыты нежным слоем нетканого материала.

Внутренний слой — нетканый материал и впитывающий слой из целлюлозы, который обеспечивает высокие впитывающие свойства. Изолирующим слоем является пленка, которая находится между нетканым материалом и впитывающим слоем, и служит для эффективной защиты от промокания (в версии с пленкой).

Применение:

- Изделия используются для впитывания выделений и повышения гигиены и комфорта женщин в послеродовой период или после гинекологических процедур и операций.
- Размер 35 см x 11 см представляет собой впитывающую прокладку прямоугольной формы для женщин в послеродовой период и людей с легким недержанием мочи.
- В стерильном варианте прокладки используются для впитывания жидкостей и выделений после родов или урологических и гинекологических процедур

Виды:

- стерильные и нестерильные
- с или без пленки
- прямоугольная и анатомическая форма

Размеры и упаковка:

- предлагаются в размерах: 22 см x 9 см, 27 x 7,5 см, 28 см x 9 см, 34 см x 9 см, 35 см x 11 см,
- стерильные, упакованы по 10 шт. или по 5 шт. (индивидуальная упаковка)
- нестерильные, упакованы по 10 шт., 15 шт. (размер 35 см x 11 см) и 20 шт. (размер 22 см x 9 см)




MD



Rectangular version / Rechteckige Version / Прямоугольная версия / Prostokątna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:

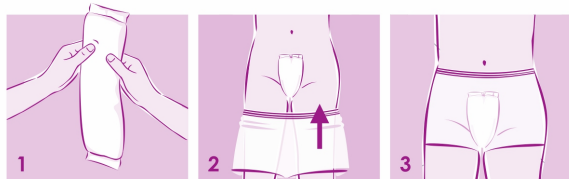


Towels should be changed regularly. / Die Vorlagen sollten regelmäßig gewechselt werden. / Прокладки следует регулярно менять. / Podkłady należy zmieniać regularnie.

The manufacturer recommends stabilisation with Seni Fix elastic supporting briefs. / Der Hersteller empfiehlt die Fixierung mit den elastischen Höschen von Seni Fix. / Производитель рекомендует использовать сетчатые трусики-фиксаторы Seni Fix для закрепления изделия. / Producent zaleca stabilizację za pomocą majtek siatkowych Seni Fix.

Anatomical version / Anatomische Version / Анатомическая версия / Anatomiczna wersja

Method of use / Anwendungsweise / Способ применения / Sposób użycia:

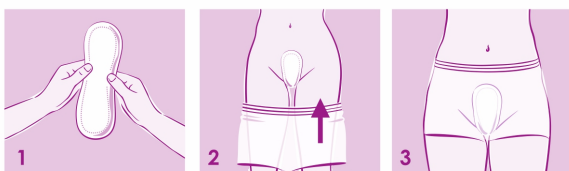

Towels should be changed regularly. / Die Vorlagen sollten regelmäßig gewechselt werden. / Прокладки следует регулярно менять. / Podkłady należy zmieniać regularnie.

The manufacturer recommends stabilisation with Seni Fix elastic supporting briefs. / Der Hersteller empfiehlt die Fixierung mit den elastischen Höschen von Seni Fix. / Производитель рекомендует использовать сетчатые трусики-фиксаторы Seni Fix для закрепления изделия. / Producent zaleca stabilizację za pomocą majtek siatkowych Seni Fix.



22cm x 9cm



27cm x 7,5cm



28cm x 9cm



34cm x 9cm



35cm x 11cm



**окладки и прямоугольные
впитывающие прокладки**