

Для того, чтобы перевязать рану, следует приготовить Tromboguard®, и вторичную повязку, например перевязочную сетку Codofix® или бинт.

1



Перед использованием повязки, следует одеть перчатки. Вскрыть упаковку.

2



Следует открывать упаковку, схватив за противоположные стороны (упаковка из металлизированной пленки) и потянуть до полного вскрытия упаковки.

3



Убедиться, что повязка будет наложена на рану правильной стороной! Повязка Tromboguard® обладает двумя поверхностями:

Нанесение гемостатической повязки Tromboguard®

4




- шероховатой активной поверхностью, которая должна быть наложена непосредственно на кровоточащее место,
- гладкой поверхностью с блеском, которая является внешней стороной, защищающей рану от воздействия внешних факторов.

5



Следует асептически наложить повязку на рану. В случае небольших ран, можно отрезать необходимый кусок (большой чем поверхность раны на 2-3 см с каждого края), позволяющий полностью закрыть рану. В случае больших ран, можно использовать несколько повязок.

6

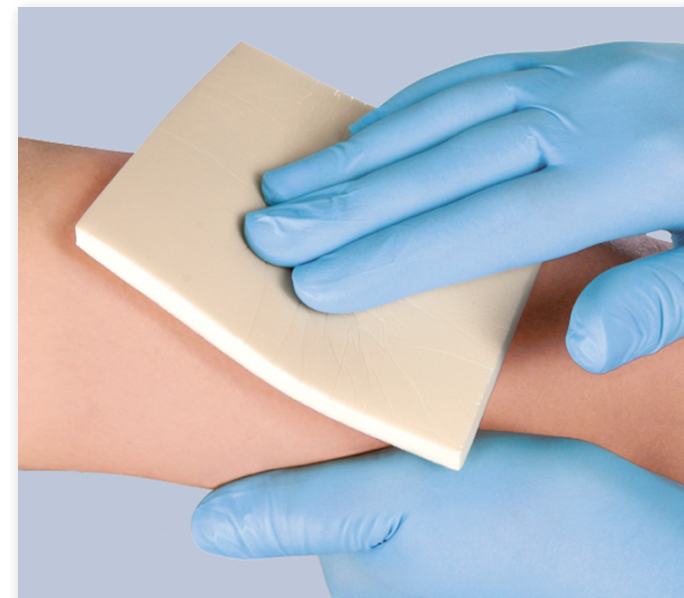

Следует обратить внимание на то, чтобы кровоточащее место было полностью закрыто повязкой.

Нанесение гемостатической повязки Tromboguard®

7



Следует обеспечивать местную компрессию минимум на три минуты, чтобы уменьшить кровоток.

8



Повязку следует зафиксировать при помощи: эластичной перевязочной сетки Codofix® или бинта (на фотографии самоклеящийся бинт Matofix COHESIVE).