

Для того, чтобы перевязать рану, следует приготовить Medisorb P PLUS, и вторичную повязку, например Medisorb F, перевязочную сетку Codofix® или бинт.

1



Перед использованием повязки, следует одеть перчатки, промыть рану раствором физиологической соли 0,9 % и высушить кожу вокруг раны.

2



Вскрыть упаковку. Следует открывать упаковку, схватив за противоположные стороны (упаковка из металлизированной пленки) и потянуть до полного вскрытия упаковки.

3



Убедиться, что повязка будет наложена на рану правильной стороной! Повязка Medisorb P PLUS имеет две поверхности: шероховатую поверхность, которая должна быть нанесена непосредственно на рану, гладкая поверхность с блеском, которая является внешней стороной, защищая рану от воздействия внешних факторов.

Нанесение полиуретановой повязки повязки Medisorb P PLUS

4



Следует асептически наложить повязку на рану. В случае небольших ран, можно отрезать необходимый кусок, позволяющий полностью закрыть рану. Повязка должна закрывать всю поверхность раны, а также кожу на 2-3 см от нее с каждого края. Повязку следует зафиксировать при помощи: пленочной повязки Medisorb F, эластичной перевязочной сетки Codofix® или бинта (на фотографии самоклеющийся бинт Matofix COHESIVE).

5



Используя бинт для фиксации повязки, всегда разворачивайте его таким образом, чтобы неразвернутая часть бинта была направлена в наружу.

6




Следует ежедневно проверять повязку и заменить немедленно в случае избыточных выделений или появления признаков воспаления, то есть покраснения, отека или чрезмерного потепление кожи вокруг раны. Лечение может быть продолжено после ликвидации воспаления. Следует сменить повязку, когда выделения доходят до краев повязки или начинают вытекать. Следует сменять повязку в течении 1-5 дней, в зависимости от морфологии раны и количества выделяемого.

7



В случае необходимости перед использованием, можно намочить повязку в растворе антибиотика.

8

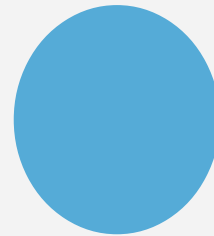

В случае небольшого количества выделений с раны, Medisorb P PLUS может высохнуть и приохнуть к поверхности раны. Тогда смена повязки может вызвать боль и кровоточивость. Чтобы этого избежать, следует перед удалением повязки намочить ее раствором физиологической соли.