

Codosil ADHESIVE это мягкая силиконовая самоклеящаяся повязка, покрытая дополнительной полиуретановой пленкой. Повязка уменьшает размер гипертрофических рубцов и келоидов, улучшает их цвет и эластичность.

1

Вскрыть упаковку и вынуть повязку. Следует подобрать изделие до размера раны при использовании ножниц. Рекомендуется, чтобы величина изделия была на 1 см больше, чем размер рубца. Не обязательно сразу же использовать всю повязку, например если повязка наносится на небольшой рубец. Можно использовать ее по частям.

2

Далее, следует отклеить белый защитный слой от самоклеящейся стороны.

3

Следует наклеить повязку на поверхность рубца. Клеящие свойства повязки позволяют многократно приклеивать ее на поверхность кожи. Перед каждым последующим использованием повязку следует помыть.

4



Для того, чтобы предотвратить случайное срывание повязки с подвижных частей тела, рекомендуется дополнительно использовать поддерживающую эластичную сетку Codofix®. Сетка предлагается в 8 размерах (различная ширина сетки), что дает возможность точно подобрать изделие к окружности участка тела, на который мы хотим нанести сетку.